

PLEXTALK®

PLEXTALK PTN2

Benutzerhandbuch



MPEG Layer-3 audio compression technology licensed by
Fraunhofer IIS and THOMSON multimedia.
<http://www.iis.fra.de/wmm/>

©2009 Shinano Kenshi Co., Ltd.

WICHTIGE HINWEISE

Funkentstörung USA FCC-HINWEIS

Konformitätserklärung

Modellnummer: PTN2

Markenname: PLEXTALK

Verantwortliche Partei: Shinano Kenshi Co., Ltd.

Adresse: 6-15-26 Chuo, Ueda-shi, Nagano-ken 386-0012 JAPAN

Dieses Gerät erfüllt Teil 15 der FCC-Bestimmungen; Für den Betrieb gelten die folgenden zwei Bedingungen:

- (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
- (2) Dieses Gerät muss jede empfangene Störung akzeptieren, auch solche Störungen, die einen ungewünschten Betriebsablauf verursachen können.

Dieses Gerät wurde getestet und arbeitet innerhalb der Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte wurden zum Schutz vor schädlicher Strahlung bei einer Installation in Wohnhäusern entwickelt. Dieses Gerät erzeugt, verwendet, und kann Energie aus dem Radiofrequenzbereich abstrahlen. Falls es nicht gemäß der Installationsanleitung aufgestellt wird, kann es bei Funkübertragungen Störungen verursachen. Es besteht jedoch keine Garantie dafür, dass bei bestimmten Installationen keine Funkstörungen auftreten. Falls dieses Gerät Störungen beim Radio- und oder Fernsehempfang verursacht, was Sie durch das Aus- und Einschalten feststellen können, können Sie diese durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen beheben:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

- Schließen Sie das Gerät an einen anderen Stromkreis als denjenigen an, mit dem der Empfänger verbunden ist.
- Fragen Sie Ihren Fachhändler oder einen Radio- und Fernsehtechniker.

ACHTUNG: Bei Änderungen oder Umbauten, die nicht ausdrücklich von der für die Einhaltung verantwortlichen Partei genehmigt wurden, verliert der Nutzer u.U. das Recht zum Betrieb des Geräts.

ACHTUNG: Durch die abweichende Art der Benutzung von Bedienelementen, sowie abweichendes Durchführen von Anweisungen, als sie das Handbuch vorsieht, können Sie sich gefährlicher Strahlung aussetzen.

INHALTSVERZEICHNIS

PLEXTALK PTX1 Pro	1
Benutzerhandbuch	1
WICHTIGE HINWEISE	2
Funkentstörung USA FCC-HINWEIS.....	2
INHALTSVERZEICHNIS	3
1. Zu diesem Handbuch	6
2. Rechts- und Copyrighthinweise	7
2.1. Copyrightangaben zu diesem Handbuch.....	7
2.2. Lizenzen und Markenzeichen.....	8
2.3. Kopiereinschränkungen.....	8
3. DAISY-Einführung	9
3.1. Was ist DAISY?	9
3.2. Die wichtigsten Funktionen von DAISY.....	9
3.3. Die verschiedenen DAISY-Bücher.....	10
3.4. Navigationsfunktionen bei DAISY.....	10
4. Der neue PLEXTALK	13
4.1. Allgemeines.....	13
4.2. Die Funktionen des PLEXTALK.....	14
5. Inbetriebnahme	14
5.1. Begriffsklärung.....	14
5.2. Verpackungsinhalt.....	15
5.3. Die Handbuch-CD.....	16

5.4. Gerätebeschreibung.	16
5.5. Akku einlegen.	20
5.6. Akku aufladen.	21
5.7. Wartung und Akkupflege.	21
5.8. Den PLEXTALK ein- und ausschalten.	22
5.9. Die Tastaturhilfe.	23
5.10. SD-Karte, USB-Speicher und CD einlegen und auswerfen	23
6. Einführung in das Menü.	25
6.1. Überblick über Menü und Funktionen.	25
6.2. Menü aufrufen und navigieren.	26
6.3. Hilfe innerhalb des Menüs.	27
7. Schnellstartanleitung.	27
7.1. Hauptbedienelemente des Geräts.	27
7.2. DAISY-Titel abspielen.	29
8. Den PLEXTALK einstellen.	31
8.1. Sprachausgabenoptionen einstellen.	31
8.2. Datum und Uhrzeit einstellen.	33
8.3. Warteklang auswählen.	34
9. Stromversorgung.	35
9.1. Niedriger Ladestand.	35
9.2. Automatisches Abschalten.	35
9.3. Neustartfunktion.	36
9.4. Einschlaffunktion.	36
10. Abspielfunktionen für alle Formate.	37
10.1. SD-Karte, USB-Medium oder CD einlegen.	38
10.2. Wiedergabe starten und stoppen.	38
10.3. Abspiellautstärke einstellen.	39
10.4. Lautstärke der Benutzerführung einstellen.	39
10.5. Abspielgeschwindigkeit einstellen.	40
10.6. Tonhöhe einstellen.	41
10.7. Das Navigationsmenü.	42
10.8. Anordnung der Dateien und Ordner auf dem PLEXTALK.	43
10.9. SD-Karte, USB-Medium oder CD auswählen.	44
10.10. Informationen zu SD-Karte, USB-Medium oder CD abrufen.	44
10.11. Vor- und Zurückspulen.	45
10.12. Lesezeichen.	46
10.13. Die integrierte Hilfe.	50
11. DAISY-Titel abspielen.	51

11.1. Überschrifts-, Seiten- und Titelinformationen abrufen.....	51
11.2. Überschriftsnavigation.	53
11.3. Anfang oder Ende eines DAISY-Titels anspringen.	54
11.4. Seitennavigation.	55
11.5. Gruppennavigation.....	56
11.6. Phrasennavigation.	57
11.7. Wiedergabeeinstellung.	57
12. Audiodateien und Musik-CDs abspielen.	58
12.1. Über Audiodateien.	59
12.2. Wiedergabeabfolge.....	60
12.3. Einschränkungen bei Audiodateien.....	60
12.4. Datei- und Albuminformationen abrufen.	61
12.5. Tracknavigation.....	62
12.6. Zum Albumanfang springen.....	63
12.7. Albumnavigation.	63
12.8. Wiedergabemodus auswählen.....	64
13. Textdateien abspielen.	65
13.1. Informationen zur Textdatei abrufen.	66
13.2. Unterschiede zwischen Nur-Text- und HTML-Dateien.....	66
13.3. Navigation nach Prozentangabe.....	67
13.4. Anfang oder Ende einer Textdatei anspringen.....	67
13.5. Navigation nach Absatz, Satz, Wort oder Zeichen.....	68
13.6. Überschriftsnavigation (nur HTML-Dateien).....	69
13.7. Wiedergabemodus.....	69
14. Medienverwaltung.	70
14.1. Verfügbare Medien.	70
14.2. Titel löschen.....	71
14.3. Allgemeines zum Kopieren.	71
14.4. DAISY-Titel kopieren.	72
14.5. Audiodateien/Musik-CDs kopieren.....	73
14.6. Textdateien kopieren.	76
14.7. SD-Karte löschen.....	76
15. Weitere nützliche Funktionen.....	78
15.1. Anzeige der Systemeigenschaften.....	78
15.2. Überspringen.	79
15.3. Alle Einstellungen des PLEXTALK auf Standard zurücksetzen.....	79
Anhang A - Hauptspezifikationen.	81
Anhang B - Menühierarchie.....	86

Anhang C - Fehlerbehebung.	89
Anhang D - Glossar.	93
Index.	99

1. Zu diesem Handbuch.

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen PLEXTALK. Dieses Handbuch beinhaltet alle Informationen, die Sie zu seiner Bedienung benötigen. Es ist so aufgebaut, dass Sie Schritt für Schritt lernen, zunächst die Grundbegriffe, und dann, wenn Sie etwas vertrauter mit dem Player sind, können Sie die technischeren Funktionen ausprobieren.

Das Handbuch gibt es im DAISY Textformat und im Nur-Text- und Microsoft Word-Format. Die DAISY-Textversion befindet sich als Hilfedatei bereits auf dem PLEXTALK. Eine MS-Word- und Nur-Text-Version finden Sie im Ordner "Manual" auf der Handbuch-CD, die Ihrem PLEXTALK beiliegt.

Haben Sie sich erst einmal mit der Struktur des Handbuchs vertraut gemacht, so werden Sie die gewünschten Informationen schnell finden. Wenn Sie das DAISY-Format noch nicht kennen, empfiehlt es sich, das Handbuch von vorne bis hinten durchzuarbeiten. Wenn Sie ein fortgeschrittener Nutzer sind oder bereits Erfahrung mit dem PLEXTALK haben, können Sie einige Eingangsinformationen überspringen. Ob Anfänger oder fortgeschrittener Nutzer, in Kapitel 4 bekommen Sie einen Überblick über die Funktionen Ihres neuen PLEXTALK.

Wenn Sie sofort einsteigen möchten, lesen Sie doch am Besten die "Schnellstartanleitung" in Kapitel 7. Hier erhalten Sie einen Überblick über die Funktionen, mit denen Sie den PLEXTALK als Player nutzen können. Möchten Sie die Funktionen lieber gleich im Detail kennenlernen, dann überspringen Sie den Abschnitt und gehen das Handbuch ganz gründlich Kapitel für Kapitel durch.

Anmerkung: Bitte beachten Sie, dass die Funktionen in der Schnellstartanleitung nur kurz, nicht im Detail beschrieben werden.

Anmerkung: Ob Sie nun sofort einsteigen oder Schritt für Schritt vorgehen möchten, lesen Sie bitte zunächst die Kapitel 2 und 5. Hier finden Sie Informationen zu Rechts- und Copyrighteinschränkungen, Inbetriebnahme, Sicherheit und erfahren, was Sie tun können, damit Ihnen der PLEXTALK lange erhalten bleibt.

2. Rechts- und Copyrighthinweise.

Dieses Kapitel enthält wichtige Hinweise zu Copyright, Lizenzen und Markenrechten, sowie Einschränkungen, denen Sie unterliegen, wenn Sie den PLEXTALK für Kopien oder digitale Aufnahmen nutzen. Wir empfehlen Ihnen dringend, sich dieses Kapitel vorher aufmerksam durchzulesen.

2.1. Copyrightangaben zu diesem Handbuch.

Shinano Kenshi behält sich das Recht vor, die in diesem Handbuch beschriebenen Produkte jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu verändern.

Shinano Kenshi macht weder Zusagen, noch gibt Shinano Kenshi eine Garantie bezüglich des Inhalts, und schließt konkludente Gewährleistungen für die Tauglichkeit oder die Eignung zu bestimmten Zwecken aus. Ferner behält sich Shinano Kenshi Co., Ltd. das Recht vor, das Vorliegende Handbuch zu überarbeiten und inhaltliche Änderungen daran vorzunehmen, ohne die Verpflichtung, irgendeine Person oder Organisation von derartigen Überarbeitungen und Änderungen in Kenntnis zu setzen.

Dieses Handbuch unterliegt dem Copyright. Alle Rechte vorbehalten. Es darf ohne die ausdrückliche Genehmigung seitens Shinano Kenshi Co., Ltd. weder kopiert, fotokopiert, übersetzt, noch auf ein elektronisches Medium gespeichert, oder auf sonstige Art und Weise in maschinenlesbare Form gebracht werden.

2.2. Lizenzen und Markenzeichen.

Alle Lizenzen und Markenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

2.3. Kopiereinschränkungen.

Bevor Sie Ihren PLEXTALK benutzen, sollten Sie folgende wichtige Informationen lesen, um sicherzustellen, dass Sie die rechtlichen Einschränkungen verstanden haben, denen bestimmte Funktionen unterliegen.

2.3.1. Allgemeines.

Dieser Plectalk ist dafür ausgelegt, Klangerzeugnisse aufzunehmen und abzuspielen, für die Sie das Copyright besitzen, oder für die Sie die Erlaubnis vom Rechteinhaber oder rechtmäßigen Lizenzgeber erhalten haben. Sofern Sie nicht das Copyright besitzen, oder die entsprechende Erlaubnis beim Rechteinhaber oder rechtmäßigen Lizenzgeber eingeholt haben, kann eine unerlaubte Aufnahme, Widergabe oder unerlaubtes Weiterverbreiten schwere zivil- und strafrechtliche Folgen gemäß den Urheberrechtsgesetzen, sowie internationalen Urheberrechtsverträgen nach sich ziehen. Wenn Sie sich bezüglich Ihrer Rechte nicht sicher sind, setzen Sie sich mit einem Rechtsberater in Verbindung.

Shinano Kenshi ist unter keinen Umständen für die Folgen illegaler Kopien verantwortlich, die mit diesem Plectalk Recorder erstellt wurden.

2.3.2. Musik-CDs.

Kopien von Musik-CDs sind für die individuelle Unterhaltung bestimmt, und dürfen ohne die ausdrückliche Genehmigung des Rechteinhabers gemäß dem Copyright nicht anderweitig verwendet werden.

3. DAISY-Einführung.

Dieses Kapitel gibt einen Überblick zum DAISY-Format und erklärt einige Begriffe. Wenn Sie ein neuer DAISY- Nutzer sind, dann sollten Sie das Folgende aufmerksam durchlesen. Erfahrene DAISY-Nutzer können die Erklärungen überfliegen oder ganz überspringen.

3.1. Was ist DAISY?

DAISY ist die Abkürzung für Digital Accessible Information System. Das Format wurde als internationaler Standard für digitale Hörbücher entwickelt. DAISY-Bücher können entweder auf einem speziellen Hardware-Player oder einem Computer mit entsprechender Software abgespielt werden.

3.2. Die wichtigsten Funktionen von DAISY.

Die wichtigsten Funktionen im DAISY-Format sind:

- Komprimierung von Informationen: Hohe Kompressionsraten ermöglichen das Abspeichern von bis zu 90 Stunden digitaler Audioinhalte auf einer CD (700MB).
- Flexible Navigation: Eine Reihe von Funktionen ermöglicht es dem Leser, schnell die gewünschte Stelle in einem DAISY-Buch anzuspringen. Das DAISY-Format ermöglicht die Navigation auf 6 Ebenen, nach Seiten, Gruppen und Phrasen. Diese Funktionen werden im Verlauf des Kapitels noch ausführlich beschrieben.
- Multimediateauglichkeit: Neben digitalem Audio kann das DAISY-Format auch Text, Graphiken und sogar Video

beinhalten, so dass der Leser eine perfekt synchronisierte Multimedia-Leseerfahrung macht.

3.3. Die verschiedenen DAISY-Bücher.

Es gibt 6 verschiedene DAISY-Buchtypen, vom reinen Audiobuch ohne Navigationsstruktur bis hin zu Büchern mit nur Text und ohne Audio. Hier eine kurze Beschreibung der einzelnen Typen:

- Typ 1 - Audio ohne Struktur: Der einfachste Buchtyp. Direkte Navigation an bestimmte Stellen ist nicht möglich.
- Typ 2 - Audio mit Struktur: Eine spezielle Textdatei enthält die Struktur des Buches mit Links zu festgelegten Punkten wie Überschriften oder Seitenzahlen, die der Leser direkt anspringen kann. Die Datei heißt Table of Contents oder ToC (Deutsch Inhaltsverzeichnis).
- Typ 3 - Audio mit Struktur und Textanteil: Neben der Struktur enthält die Inhaltsdatei Textanteile, wie Glossar oder Index, aus dem Buch. Wird das Buch am PC gehört, erscheint der Text auf dem Bildschirm und der Leser kann ihn nach bestimmten Wörtern durchsuchen.
- Typ 4 - Audio mit vollständigem Buchtext: Dieser Typ ist am aufwendigsten zu produzieren, aber er bietet den besten Zugang zum Buch. Audio und Text sind vollständig synchronisiert, so dass immer der Text zum abgespielten Audioinhalt auf dem Bildschirm erscheint.
- Typ 5 - Vollständiger Text mit Audioanteilen: Ein Buch mit Struktur und vollständigem Text, aber nur Audioanteilen. Die Inhaltsdatei enthält Struktur und Buchtext, aber nur ein Teil existiert als Audio.
- Typ 6 - Volltext ohne Audio: Eine elektronische Textstruktur ohne Audiodateien.

3.4. Navigationsfunktionen bei DAISY.

Das DAISY-Format bietet dem Leser eine Reihe von Möglichkeiten, in einem Buch zu „blättern“. In diesem Abschnitt werden die wichtigsten Navigationsfunktionen kurz beschrieben.

3.4.1. Navigationsebenen.

Ein DAISY-Buch kann über bis zu 6 Navigationsebenen verfügen. Die jeweilige Anzahl hängt von der Struktur des Originalbuchs ab. Die Anordnung ist hierarchisch, wobei Ebene 1 die Höchste und Ebene 6 die Niedrigste ist. Dies kann man sich so vorstellen, wie die Hierarchie innerhalb des Inhaltsverzeichnisses eines Buches, in dem es Hauptkapitel mit Unterabschnitten gibt, und so weiter. Jede Überschrift innerhalb des DAISY-Buchs wird einer Navigationsebene von 1 bis 6 zugeordnet.

Genauere Festlegungen zur Nutzung der Navigationsebenen in einem DAISY-Buch gibt es nicht, denn dies hängt vom einzelnen Buch ab, zudem gehen die Meinungen darüber oft auseinander. Bei einfachen Büchern, die nur in Kapitel unterteilt sind, reicht wahrscheinlich eine Navigationsebene aus. Bei komplexeren Büchern mit Kapiteln, Abschnitten und Unterabschnitten können 3 Ebenen genutzt werden (Ebene 1 für Kapitel, Ebene 2 für Abschnitte und Ebene 3 für Unterabschnitte). Nach dem Erstellen des Buches sind die Navigationsebenen festgelegt und können vom Leser nicht geändert werden.

Sucht der Leser nach einer bestimmten Stelle im Buch, beginnt er auf einer höheren Ebene (wie Ebene 1 oder 2). Hat er die gewünschte Hauptüberschrift gefunden, wechselt er auf eine niedrigere Navigationsebene, um die gesuchte Stelle direkt anzuspringen. So kann der Leser große Teile des Buches überspringen, die er gerade nicht lesen möchte.

3.4.2. Überschriften.

Damit die oben beschriebenen Navigationsebenen genutzt werden können, müssen alle relevanten Navigationspunkte in der Aufnahme

markiert sein. In diesem Handbuch werden solche Markierungen Überschriften genannt. Überschriften, die in einer DAISY-Aufnahme markiert sind, kann, abhängig von der Struktur des Originalbuchs, eine Navigationsebene zugeordnet werden. Werden Überschriften eingefügt, erfolgt eine automatische Nummerierung von 1 aufsteigend, nach der Reihenfolge, in der sie in der Aufnahme vorkommen.

3.4.3. Seiten.

In einem DAISY-Buch mit Seitennavigation kann der Leser bestimmte Seiten direkt anspringen oder jeweils eine Seite vor- oder zurückblättern. Dazu müssen bei der Erstellung die Seitenmarkierungen im Buch eingefügt werden. Die Seitennummerierung erfolgt automatisch von 1, am Anfang der Aufnahme, an. Der Leser kann keine Seiten hinzufügen.

Anmerkung: Die Seitenmarkierungen im DAISY-Buch sollten immer auf den Textanfang der Buchseite verweisen, nicht an das Ende, wo die Seitenzahl im gedruckten Buch meist steht, so dass jede Seite, die der Leser im DAISY-Buch anspringt, von Anfang an abgespielt wird.

3.4.4. Gruppen.

Die Gruppenmarkierung kann für Abschnitte des Buches genutzt werden, die unabhängig von den anderen Navigationsstrukturen von Interesse sind, z. B. Diagramme, Tabellen, hervorgehobene Stellen, Sicherheitshinweise, und so weiter. Dies kann bei sinnvollem Einsatz sehr hilfreich sein. Gruppen müssen beim Erstellen des DAISY-Buchs definiert werden, der Leser kann sie nicht ändern.

3.4.5. Phrasen.

Schon während der Aufnahme können die Audiodateien in "Phrasen" unterteilt werden. Phrasenanfang und –Ende werden durch die Stille

zwischen zwei Audioanteilen in der Aufnahmesoftware definiert. Die Dauer der Stille zwischen zwei Phrasen heißt Pausenlänge und kann für die jeweilige DAISY-Aufnahme angepasst werden. Bei schnellen Lesern sind kürzere, bei langsamen Lesern längere Pausenlängen sinnvoll. Phrasen sollten weder zu lang noch zu kurz sein. Bei abgeschlossenen Aufnahmen können sie als zusätzliches Navigationselement genutzt werden.

3.4.6. Abschnitte.

Abschnitt heißt der Audioinhalt zwischen zwei Überschriften. Ein Abschnitt besteht aus mindestens einer, in der Regel aber aus mehreren Phrasen. Jedem Abschnitt ist eine Überschrift und eine Navigationsebene zugeordnet. Bitte verwechseln Sie die Abschnitte einer DAISY-Aufnahme nicht mit denen dieses Handbuchs.

3.4.7. Lesezeichen.

In fertigen Büchern kann der Leser interessante Stellen mit Lesezeichen versehen, um sie später wiederzufinden. Die Anzahl möglicher Lesezeichen hängt vom DAISY-Player ab, aber in der Regel sind es mehr als benötigt. Lesezeichen sind das einzige Navigationselement, das der Leser hinzufügen und entfernen kann.

4. Der neue PLEXTALK.

Dieses Kapitel macht Sie mit dem PLEXTALK und seinen wichtigsten Funktionen vertraut.

4.1. Allgemeines.

Der PLEXTALK PTN2 ist ein DAISY-fähiger Hör-/Textbuch-Player in robustem Design als Tischgerät mit vielfachen Möglichkeiten für DAISY-fähige Audio- oder Textbücher, und nutzerfreundlichem

Hardwaredesign, dessen Bedienelemente Menschen mit Seheinschränkungen einen uneingeschränkten Zugang gewährleisten.

4.2. Die Funktionen des PLEXTALK.

Das hat der PLEXTALK zu bieten:

- Wiedergabe von DAISY-Büchern
- Wiedergabe von Text-/HTML-Inhalten mit eingebauter Sprachausgabe
- Wiedergabe von Musik-CDs
- Wiedergabe von MP3-Dateien
- Unterstützung von 32GB SD-Karten und USB-Flashspeichern
- Medientransfer von USB ohne PC
- Hochwertiger Lautsprecher
- Aufladbarer Akku mit Netzteil

5. Inbetriebnahme.

Nun können Sie Ihren neuen PLEXTALK endlich in Betrieb nehmen. In diesem Kapitel lernen Sie im gesamten Handbuch verwendete Begriffe kennen. Dann erkunden Sie Verpackungsinhalt und PLEXTALK. Schließlich erfahren Sie, wie Sie den Akku einlegen, aufladen und pflegen können. Grundfunktionen wie Ein- und Ausschalten oder Einführen und Auswerfen von SD-Karten werden auch schon beschrieben.

5.1. Begriffsklärung.

Im Folgenden werden die in diesem Handbuch verwendeten Begriffe erläutert.

- **WARNUNG:** Diese Meldung weist auf mögliche Verletzungsgefahr hin.

- **ACHTUNG:** Diese Meldung weist auf Risiken hin, die den PLEXTALK, das Aufnahmemedium, Ihre Daten oder Computerkonfiguration beschädigen oder zerstören können.
- **Anmerkung:** Anmerkungen geben nützliche Zusatzinformationen zu einer Funktion. Normalerweise stehen Sie unter dem zugehörigen Anleitungstext.
- **Erinnerung:** Hiermit sollen Sie an bereits Erwähntes erinnert werden. Erinnerungen stehen in der Regel vor den zugehörigen Informationen.
- **SD-Karte:** Der PLEXTALK unterstützt sowohl SD- als auch SDHC- Karten. In diesem Handbuch werden beide SD-Karte genannt.
- Alle Tasten- und Funktionsbezeichnungen sind groß geschrieben.
- Menüeinträge sind in Anführungsstrichen und groß geschrieben.
- Um das Handbuch kurz zu halten, werden hier nicht immer alle Vorgänge im Detail beschrieben. In vielen Fällen gibt Ihnen die eingebaute Sprachausgabe die Informationen, die sie zur Handhabung des PLEXTALK benötigen.

5.2. Verpackungsinhalt.

Hier eine Liste aller Gegenstände, die Sie in Ihrer PLEXTALK-Verpackung finden. Bitte überprüfen Sie sie auf Vollständigkeit. Sollte etwas fehlen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

- 1 PLEXTALK PTN2
- 1 Abdeckhaube
- 1 Netzteil
- 1 Handbuch-CD
- 1 Kurzanleitung
- 1 Sicherheitsanleitung

Anmerkung: Es wird dringend empfohlen, die Verpackung vollständig aufzubewahren, für den Fall, dass der PLEXTALK einmal eingeschickt werden muss.

5.3. Die Handbuch-CD.

Die Handbuch-CD, die Sie in Ihrer Verpackung finden, beinhaltet Folgendes:

- Handbuch im Microsoft Word-Format - Diese Version des Handbuchs finden Sie im Ordner "Manual" unter dem Dateinamen "PTN2 Users Guide.doc".
- Handbuch im Nur-Text-Format – Diese Version des Handbuchs finden Sie im Ordner "Manual" unter dem Dateinamen "PTN2 Users Guide.txt".

5.4. Gerätebeschreibung.

In diesem Abschnitt werden Aussehen des PLEXTALK und Lage der Tasten und anderer Bedienelemente beschrieben, damit Sie sie bei Erwähnung in den folgenden Kapiteln leicht finden. Auch ihre Namen und Hauptfunktionen werden hier erläutert.

Nehmen Sie das Gerät vorsichtig in die Hand und erkunden die Ober- und Unterseite. Auf der Oberseite sind 27 Gummitasten, auf der Unterseite nur 5 GummifüÙe, 4 an den Ecken und ein langer, gerader Fuß. Stellen Sie das Gerät nun vor sich hin, so dass seine 5 GummifüÙe auf einer glatten Oberfläche stehen.

Suchen Sie die perforierte Oberfläche des Lautsprechers. Drehen Sie den PLEXTALK nun so, dass der Lautsprecher nach oben rechts zeigt. Jetzt steht der PLEXTALK richtig herum vor Ihnen, und die längste Seite sollte zu Ihnen zeigen. Auf dieser Seite finden Sie eine leichte, aber erkennbare, gerade Einkerbung, den CD-Schlitz.

5.4.1. Oberseite.

Auf der Oberseite des PLEXTALK befinden sich 27 Gummitasten, verteilt auf 5 Blocks: links eine senkrechte Reihe mit 4 Tasten, in der Mitte ein rechteckiger Block mit 12 Tasten, unter und über dem rechteckigen Block je eine waagerechte Reihe mit 3 Tasten und rechts eine senkrechte Reihe mit 5 Tasten.

Die oberste der 4 Tasten auf der linken Seite ist oval, die unterste dreieckig und die beiden mittleren Tasten sind rautenförmig. Die 4 Tasten von oben nach unten:

- Menütaste - für den Zugang zum Hauptmenü.
- Bücherregal-Taste - zum Wechseln des Mediums.
- Gehe-Zu-Taste - für die Seiten- und Überschriftsnavigation.
- Lesezeichentaste - zum Anspringen, Setzen und Löschen von Lesezeichen.

Der rechteckige Block mit 12 Tasten in der Mitte der Geräteoberseite ist der Nummernblock. Die Tasten sind in 4 Reihen mit je 3 Tasten angeordnet, genau wie beim Telefon: In der ersten Reihe die Zahlen 1, 2 und 3, in der zweiten Reihe die Zahlen 4, 5 und 6, in der dritten Reihe die Zahlen 7, 8 und 9 und in der vierten Reihe die Sterntaste, die Zahl 0 und die Rautetaste. Zur besseren Orientierung ist die Taste 5 mit einem kleinen Punkt markiert.

Mit der Rautetaste, unten rechts auf dem Nummernblock, werden Aktionen bestätigt. Deshalb nennen wir sie in diesem Handbuch Eingabetaste. Mit der Sterntaste, unten links auf dem Nummernblock, werden Aktionen abgebrochen. Deshalb nennen wir sie in diesem Handbuch Abbrechen-Taste.

Einige der Tasten haben folgende Zusatzfunktionen:

Taste 2 = Pfeil Rauf oder Abbrechen

Taste 4 = Pfeil Links oder Zurück

Taste 6 = Pfeil Rechts oder Vorwärts

Taste 8 = Pfeil Runter oder Eingabe

Taste 9 = Dateien Kopieren oder Verschieben

Sterntaste = Rückgängig
Rautetaste = Wiederholen

Unter dem Nummernblock ist eine Reihe mit 3 Tasten. Die beiden äußeren Tasten sind halbkreisförmig, die Mittlere rechteckig mit einer Einkerbung, so dass sie leicht zu finden ist. Die 3 Tasten von links nach rechts:

- Rückspultaste - Zurück oder Zurückspulen (gedrückt gehalten)
- Play-/Stoptaste - Wiedergabe/Stop
- Vorspultaste - Vorwärts oder Vorspulen (gedrückt gehalten)

Über dem Nummernblock ist eine Reihe mit 3 Tasten. Die beiden äußeren Tasten sind senkrecht rautenförmig, die Mittlere eine größere Rautenform. Alle sind in der Mitte in Ober- und Unterseite unterteilt. Die 3 Tasten von links nach rechts:

- Tonhöheregler - die Oberseite ist die Höher-Taste, die Unterseite die Tiefer-Taste.
- Lautstärkeregler - die Oberseite ist die Lauter-Taste, die Unterseite die Leiser-Taste.
- Geschwindigkeitsregler - die Oberseite ist die Schneller-Taste, die Unterseite die Langsamer-Taste.

Schließlich gibt es auf der Geräteoberseite noch die 5 Tasten auf der rechten Seite. Die rautenförmige Taste unmittelbar rechts neben den Tasten 3 und 6 ist die Informationstaste. Die Taste unmittelbar rechts neben der Vorspultaste ist die Titeltaste. Sie ist in der Mitte in rechte und linke Seite unterteilt. Die rechte Seite ist die Nächster-Titel-Taste, die linke Seite die Vorheriger-Titel-Taste. Die Tasten sind:

- Informationstaste - zum Abrufen der Informationen zu DAISY-Büchern, Audio- oder Textdateien. Halten Sie die Taste gedrückt, werden Datum und Uhrzeit angesagt.
- Titeltaste - zum Wechsel des Mediums durch gemeinsames Drücken beider Seiten. Zum Titelwechsel drücken Sie die Nächster-Titel-Taste, rechts, oder die Vorheriger-Titel-Taste, links.

Die verbleibenden 3 Tasten sind auf der rechten Seite des Geräts linear angeordnet. Die obere Taste ist klein und rund, die Untere klein und quadratisch. Dazwischen ist eine leicht abgesenkte, größere runde Taste. Die 3 Tasten von oben nach unten:

- Einschlaftaste - zum Einstellen der Einschlaffunktion
- Ein-/Aus-Taste - zum Ein- und Ausschalten des Geräts
- Auswurf-taste - zum Auswerfen der CD

5.4.2. Vorderseite.

Auf der Vorderseite des Geräts befindet sich der Schlitz zum Einführen und Auswerfen von CDs. Schieben Sie Ihre CD mit einem DAISY-Buch, Musik oder MP3-Dateien hier hinein. Sie wird dann automatisch eingezogen.

5.4.3. Linke Seite.

Auf der linken Seite des Geräts befinden sich 3 Anschlüsse. Dies sind, von vorne nach hinten, der SD-Kartenschlitz, der Kopfhöreranschluss und der USB-Schlitz. Der SD-Kartenschlitz ist sowohl für SD-Karten als auch für SDHC-Karten. Der USB-Schlitz ist für USB-Flashspeicher.

5.4.4. Rechte Seite.

Auf der rechten Seite des Geräts ist nichts von Bedeutung.

5.4.5. Rückseite.

Auf der Rückseite des Geräts, in der Mitte, befindet sich ein kleines rundes Loch, das von einem Quadrat umschlossen wird. Das ist der Anschluss für das Netzteil.

5.4.6. Unterseite.

Drehen Sie Ihren PLEXTALK vorsichtig um und legen ihn so auf die Oberseite, dass die Vorderseite weiterhin zu Ihnen zeigt.

Ein Stück links von der Mitte der Unterseite sind 3 Erhebungen, am rechten Rand des Batteriedeckels. Dieser ist links unten mit einer Schraube befestigt. Um ihn zu öffnen, entfernen Sie zunächst die Schraube. Dann legen Sie Ihren Daumen auf die 3 Erhebungen und schieben den Batteriedeckel leicht nach links und ziehen ihn zur linken Seite ab. Er sollte leicht abgehen, ohne zu viel Druck.

5.5. Akku einlegen.

Folgendermaßen können Sie den Akku einlegen oder wechseln:

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen das Netzteil ab.
- Drehen Sie Ihren PLEXTALK vorsichtig um und legen ihn so auf die Oberseite, dass die Vorderseite zu Ihnen zeigt.
- Öffnen Sie den Batteriedeckel, wie im letzten Abschnitt beschrieben, und ziehen den alten Akku an der Ausbuchtung seiner linken Seite heraus.
- Legen Sie den neuen Akku so ein, dass die Seite mit den 5 kleinen Löchern nach rechts, und die Ausbuchtung nach oben zeigt.
- Schieben Sie den Akku vorsichtig senkrecht ins Batteriefach.
- Schließen Sie den Batteriedeckel, indem Sie ihn von links nach rechts schieben.
- Befestigen Sie den Deckel mit der Schraube.

WARNUNG: Nutzen Sie nur den empfohlenen Akkutyp für dieses Gerät. Andernfalls kann eine Explosion oder ein Feuer ausgelöst werden.

5.6. Akku aufladen.

Um den Akku im Gerät zu laden, müssen Sie den PLEXTALK folgendermaßen an das Stromnetz anschließen:

- Legen Sie den PLEXTALK richtig herum vor sich hin
- Um den Akku aufzuladen, stecken Sie zunächst das mitgelieferte Netzteil in den Netzanschluss in der Mitte der Rückseite. Dann stecken Sie es in die Steckdose, und das Aufladen beginnt.

5.7. Wartung und Akkupflege.

Es ist wichtig, dass Sie Ihren PLEXTALK pflegen, um sicherzustellen, dass Sie nicht versehentlich das Gerät, den Akku oder ein Abspielmedium beschädigen. Es wird dringend empfohlen, dass Sie diesen Abschnitt aufmerksam durchlesen.

5.7.1. Gerätereinigung.

Wenn Sie Ihren PLEXTALK reinigen, achten Sie auf Folgendes:

- **WARNUNG:** Nehmen Sie den PLEXTALK vor dem Reinigen immer vom Stromnetz.
- Wischen Sie Staub oder Schmutz vorsichtig mit einem feuchten Tuch mit ein wenig klarem Reinigungsmittel vom PLEXTALK ab, dann wischen Sie ihn mit einem Tuch trocken.

5.7.2. Akkupflege.

Um Ihren Akku optimal nutzen zu können, sollten Sie folgendes genau beachten:

- Der Akku wird normalerweise innerhalb von 4 Stunden vollständig aufgeladen. Bei der ersten Nutzung des

PLEXTALK, oder wenn der Akku mindestens einen Monat nicht benutzt wurde, sollten Sie das Gerät jedoch mindestens 24 Stunden am Stromnetz lassen.

- Wenn Sie den PLEXTALK länger als einen Monat nicht benutzen wollen, nehmen Sie den Akku heraus und lagern ihn an einem kühlen Ort mit wenig Feuchtigkeit.
- Die Lebensdauer des Akkus hängt von der Nutzung und der Anzahl der Ladevorgänge ab. Die Ladekapazität nimmt mit der Zeit ab. Wenn die Laufzeit nach dem Aufladen zu kurz wird, müssen Sie den Akku austauschen. Einen neuen Akku erhalten Sie bei Ihrem Händler, der Ihnen auch Auskunft zu Recycling und Entsorgung alter Akkus geben kann.
- Die Laufzeit kann von Raumtemperatur und Umgebung abhängen.

Zum Erhalt der Akkuleistung führen Sie alle 6 Monate folgendes Verfahren durch:

- Akku vollständig aufladen
- Akku vollständig entladen
- Akku erneut aufladen

5.8. Den PLEXTALK ein- und ausschalten.

Folgendermaßen können Sie das Gerät ein- und ausschalten:

- Zum Einschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Ein Klang signalisiert, dass der PLEXTALK sich startet. Ist er eingeschaltet, leuchtet die Ein-/Aus-Taste grün auf. Kurz danach sagt der PLEXTALK, dass er auf ein Medium zugreift.
- Zum Ausschalten halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Der PLEXTALK piept und sagt, dass er sich ausschaltet. Nach einer kurzen Pause gibt ein anderer Klang zu erkennen, dass der PLEXTALK sich ausgeschaltet hat.

Anmerkung: Bei der ersten Nutzung des Geräts oder nach einem Akkuwechsel dauert der Einschaltvorgang etwa 30 Sekunden.

5.9. Die Tastaturhilfe.

Die Tastaturhilfe wird mit der Menütaste ein- und ausgeschaltet.

Erinnerung: Die Menütaste ist oben links auf dem Gerät.

Wie der Name schon sagt, kann der Nutzer sich mit der Tastaturhilfe über die einzelnen Tasten des PLEXTALK informieren. Besonders für Nutzer, die den PLEXTALK noch nicht kennen, bietet sie eine gute Möglichkeit, alle Funktionen schnell kennenzulernen.

- Zum Einschalten der Tastaturhilfe halten Sie die Menütaste gedrückt. Der PLEXTALK piept und sagt, dass die Tastaturhilfe an ist. Wenn Sie nun eine beliebige Taste auf dem Gerät drücken, wird deren Funktion angesagt.
- Zum Ausschalten der Tastaturhilfe halten Sie die Menütaste gedrückt. Der PLEXTALK piept und sagt, dass die Tastaturhilfe aus ist.

5.10. SD-Karte, USB-Speicher und CD einlegen und auswerfen

Folgendermaßen können Sie eine SD-Karte einführen:

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Stecken Sie die SD-Karte in den SD-Kartenschlitz an der linken Seite des Geräts. Halten Sie die SD-Karte so, dass die abgeschnittene Ecke sich vorne rechts befindet. Die abgeschnittene Ecke muss also zur Vorderseite des Geräts zeigen.
- Drücken Sie die Karte ganz in den Schlitz, bis sie einrastet und komplett im PLEXTALK verschwindet. Dabei müssen Sie keine Gewalt anwenden.

Folgendermaßen können Sie die SD-Karte herausnehmen:

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Schieben Sie die SD-Karte nach innen und lassen sie dann los. Sie springt dann ein Stück nach außen.
- Ziehen Sie die Karte vorsichtig aus dem Schlitz.

Anmerkung: SD-Karten haben eine Sperrvorrichtung, mit der Sie Ihre Daten schützen können. Der Schieber für den Schreibschutz befindet sich an der langen Seite der Karte, schräg gegenüber der abgeschnittenen Ecke. Zeigt der Schieber zur Vorderkante der Karte hin, können Sie Titel kopieren und löschen. Zeigt er von der Vorderkante weg, sind Ihre Daten geschützt.

Stellen Sie sicher, dass der Schieber in der richtigen Position ist, bevor Sie die Karte einführen, denn sonst funktioniert sie möglicherweise nicht in der gewünschten Weise. Den Schieber können Sie einfach mit dem Fingernagel bewegen.

Folgendermaßen können Sie einen USB-Speicher anschließen:

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Stecken Sie den USB-Speicher in den USB-Schlitz.

Folgendermaßen können Sie den USB-Speicher herausnehmen:

- Schalten Sie das Gerät ab.
- Ziehen Sie den USB-Speicher gerade aus dem Gerät.

Folgendermaßen können Sie eine CD einlegen:

- Vergewissern Sie sich, dass der PLEXTALK eingeschaltet ist.
- Drehen Sie die CD mit der Beschriftung nach oben.
- Schieben Sie die CD vorsichtig in den CD-Schlitz vorne am PLEXTALK.
- Schieben Sie so lange, bis die CD automatisch eingezogen wird.

Anmerkung: Wenn Sie versehentlich eine CD verkehrt herum einlegen, versucht der PLEXTALK sie zu lesen und sagt dann, "Kein

Inhalt auf der CD gefunden". Nehmen Sie die CD dann heraus und legen sie richtig herum wieder ein.

Erinnerung: Die CD-Auswurf Taste ist die quadratische Taste unten rechts am Gerät.

Folgendermaßen können Sie eine CD herausnehmen:

- Drücken Sie die Auswurf Taste einmal.
- Der PLEXTALK sagt, dass die CD ausgeworfen wird.
- Wenn die CD herauskommt, können Sie sie aus dem Schlitz ziehen.

6. Einführung in das Menü.

Viele Funktionen des PLEXTALK können über das integrierte Menü erreicht werden. In diesem Kapitel erhalten Sie einen Überblick über seine Struktur und Bedienung. Sie müssen das Folgende nicht sofort lesen, doch ein Überblick über das Menü wird Ihnen das Durcharbeiten der folgenden Kapitel erleichtern.

6.1. Überblick über Menü und Funktionen.

Zwar wird immer nur von einem Menü gesprochen, doch eigentlich handelt es sich um ein hierarchisches Menü mit einer Reihe von Untermenüs, auf die man von der jeweils höheren Ebene aus Zugriff hat. Auf der höchsten Ebene ist das Hauptmenü mit den folgenden 4 Einträgen:

- Wiedergabeeinstellungen – zum wiederholten Anhören von Audiodateien.
- Überspringen – zur Auswahl, ob und welche Einträge übersprungen werden sollen.
- Medienverwaltung – zum Abrufen von Medieninformationen und Löschen von Titeln, außer bei CDs.

- Systemeinstellungen – Zum Abrufen und Ändern von System- und sonstigen Einstellungen.

Anmerkung: In Anhang B können Sie sich einen Überblick über die Menühierarchie verschaffen. Außerdem werden alle Funktionen im jeweiligen Bereich des Handbuchs erläutert.

6.2. Menü aufrufen und navigieren.

Erinnerung: Die Menütaste ist oben links auf dem Gerät. Die Tasten 2, 4, 6 und 8 sind in der Mitte des Geräts.

Zum Aufrufen des Menüs drücken Sie die Menütaste einmal. Der PLEXTALK sagt "Menü, Wiedergabeeinstellung". Sie befinden sich also im "Menü" auf dem Eintrag "Wiedergabeeinstellung".

Folgendermaßen können Sie sich im Menü bewegen:

- Zur Auswahl eines Eintrags auf der Menüebene, auf der Sie sich befinden, bewegen Sie sich mit Taste 4 nach links oder mit Taste 6 nach rechts. Der neue Menüeintrag, auf dem Sie stehen, wird angesagt.
- Wenn Sie sich immer in derselben Richtung durch eines der Menüs bewegen, kehren Sie am Ende wieder zu Ihrem Ausgangspunkt zurück.
- Zur Auswahl eines Menüeintrags drücken Sie Taste 8 oder Eingabe. Wenn es ein zu diesem Zeitpunkt verfügbares Untermenü gibt, wechseln Sie dorthin, eine Ebene tiefer in der Menüstruktur. Der Eintrag, auf dem Sie stehen, wird angesagt.
- Um sich eine Menüebene höher zu bewegen, drücken Sie Taste 2 oder Abbrechen. Der Menüeintrag auf der höheren Ebene wird angesagt.
- Wenn Sie sich im Hauptmenü befinden, können Sie das Menü durch Drücken der Taste 2 oder Abbrechen verlassen.
- Aus jeder Menüebene können Sie das Menü durch Drücken der Menütaste jederzeit sofort verlassen.

Anmerkung: Unter einigen Menüpunkten werden Informationen angesagt, die Sie sich bei nur einmaligem Hören vielleicht nicht gleich merken können, zum Beispiel Systemversionsnummer und Seriennummer Ihres PLEXTALK. Solche Meldungen werden wiederholt, bis Sie die Ansage abbrechen. Mit der Menütaste brechen Sie die Ansage ab und verlassen das Menü. Möchten Sie die Ansage abbrechen ohne das Menü zu verlassen, drücken Sie die Taste 2 oder Abbrechen (die Sterntaste).

6.3. Hilfe innerhalb des Menüs.

Überall im Menü wird Ihnen der Eintrag angesagt, auf dem Sie stehen, wenn Sie die Informationstaste einmal drücken.

7. Schnellstartanleitung.

In diesem Kapitel wird erklärt, wie Sie den PLEXTALK als DAISY-Player benutzen können. Sie erhalten einen Überblick über die Funktionen, sie werden jedoch nicht im Einzelnen erläutert. Die Hauptabschnitte dieser Schnellstartanleitung behandeln die Grundfunktionen und das Abspielen von DAISY-Titeln.

Anmerkung: In diesem Kapitel wird vorausgesetzt, dass Sie soweit mit dem PLEXTALK vertraut sind, dass die Lage der Tasten nicht erklärt werden muss. Andernfalls lesen Sie bitte zuerst Abschnitt 5.4, bevor Sie sich mit diesem Kapitel beschäftigen.

7.1. Hauptbedienelemente des Geräts.

Zum Einschalten des PLEXTALK halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt. Kurz danach sagt der PLEXTALK, ob auf SD-Karte, USB oder CD zugegriffen wird. Zum Ausschalten des PLEXTALK halten Sie die Ein-/Aus-Taste gedrückt.

Zum Sperren der Tastatur halten Sie die Vor- und Rückspultaste gleichzeitig gedrückt. Wenn die Tastatur gesperrt ist, funktionieren

die Tasten samt Ein-/Aus-Taste nicht mehr und können also keine Funktionen versehentlich ausgelöst werden. Zum Aufheben der Tastatursperre halten Sie die Vor- und Rückspultaste erneut gleichzeitig gedrückt.

Drücken Sie die Menütaste einmal, um das Menü aufzurufen. Bewegen Sie sich mit Taste 4 oder 6 zwischen den Einträgen auf einer Ebene und wählen mit Taste 8 oder Eingabe einen Eintrag aus. Mit Taste 2 oder Abbrechen springen Sie eine Ebene höher oder verlassen das Menü, wenn Sie sich im Hauptmenü befinden. Durch Drücken der Menütaste können Sie das Menü jederzeit verlassen. Für Hilfe im Menü drücken Sie die Informationstaste einmal.

Zum gleichzeitigen Erhöhen von Wiedergabe- und Benutzerführungslautstärke drücken Sie die Lauter-Taste, zum Senken die Leiser-Taste, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist. Zum Schnellen Ändern der Lautstärke halten Sie die Taste gedrückt.

Möchten Sie nur die Benutzerführungslautstärke ändern, drücken Sie die Menütaste und wählen "Systemeinstellungen" und dann „Lautstärke der Benutzerführung einstellen“. Stellen Sie mit Taste 4 oder 6 die gewünschte Lautstärke ein. Bestätigen Sie mit Eingabe und schließen dann das Menü.

Zum Erhöhen der Wiedergabegeschwindigkeit drücken Sie die Schneller-Taste, zum Senken die Langsamer-Taste. Zum schnellen Ändern der Geschwindigkeit halten Sie die Taste gedrückt.

Zum Erhöhen der Wiedergabetonhöhe drücken Sie die Höher-Taste, zum Senken die Tiefer-Taste. Zum Schnellen Ändern der Tonhöhe halten Sie die Taste gedrückt.

Eine SD-Karte können Sie einführen, indem Sie sie in den SD-Kartenschlitz auf der linken Seite des Geräts stecken. Die Beschriftung muss nach oben zeigen und die abgeschnittene Ecke nach vorne rechts, zur Vorderseite des Geräts. Der PLEXTALK erkennt, dass eine SD-Karte eingelegt wurde und greift automatisch auf ihren Inhalt zu.

Zum Herausnehmen schieben Sie die SD-Karte nach innen und lassen sie dann los. Dabei muss das Gerät ausgeschaltet sein, da sonst der Karteninhalt beschädigt werden kann.

Informationen zum aktuellen Titel erhalten Sie durch Drücken der Informationstaste. Durch wiederholtes Drücken der Taste bewegen Sie sich schnell durch die Einträge.

Datum und Uhrzeit werden angesagt, wenn Sie die Informationstaste gedrückt halten. Wenn Sie Datum und Uhrzeit auf der integrierten Uhr einstellen möchten, drücken Sie die Menütaste und wählen unter "Systemeinstellungen" "Datum und Uhrzeit einstellen". Es wird angesagt, wie Sie Datum und Uhrzeit eingeben müssen. Danach bestätigt der PLEXTALK Ihre Eingaben.

Die integrierte Hilfe können Sie jederzeit durch Drücken der Taste 0 aufrufen oder verlassen. Die Hilfedatei liegt im DAISY 3 Nur-Text-Format vor.

7.2. DAISY-Titel abspielen.

Zum Ausprobieren der in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen öffnen Sie am besten einen DAISY-Titel, vielleicht die integrierte Hilfe, die eine DAISY-Version der wichtigsten Kapitel dieses Handbuchs beinhaltet.

Drücken Sie die Taste 0 einmal zum Aufrufen der Hilfedatei. Durch erneutes Drücken der Taste verlassen Sie sie wieder.

Drücken Sie Play-/Stop, um die Wiedergabe zu starten. Wenn Sie die Handbuch-Datei schon einmal in diesem Gerät benutzt haben, beginnt die Wiedergabe an dem Punkt, an dem sie beim letzten Mal unterbrochen wurde. Drücken Sie Play-/Stop erneut, um die Wiedergabe zu stoppen.

Wenn der PLEXTALK einen DAISY-Titel bis zum Ende abgespielt hat, stoppt er automatisch. Wenn Sie dann Play-/Stop drücken, beginnt die Wiedergabe wieder am Titelanfang.

Zum Anfang des DAISY-Titels springen Sie durch zweimaliges Drücken der Gehe-zu-Taste gefolgt von Eingabe. Zum Ende des Titels springen Sie durch zweimaliges Drücken der Gehe-zu-Taste gefolgt von der Taste 0 und Eingabe.

Bewegen Sie sich mit den Tasten 2 und 8 durch die Navigationsoptionen des aktuellen DAISY-Buchs. Mit den Tasten 4 und 6 können Sie sich innerhalb der gewählten Navigationsoption vor und zurück bewegen.

Um eine Phrase vor- oder zurückzuspringen, müssen Sie zunächst "Phrase" aus den Navigationsoptionen wählen. Dann drücken Sie Taste 4 oder 6. Oder drücken Sie einfach die Vor- oder Rückspultaste.

Zum Vor- und Zurückspulen im DAISY-Titel halten Sie die Vor- oder Rückspultaste gedrückt. Für Zeitsprünge bis zu 10 Minuten halten Sie die Taste gedrückt, und der PLEXTALK sagt an, wie viel Zeit er überspringt. Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Zeit angesagt wird. Bei mehr als 10 Minuten spult der PLEXTALK weiter, bis Eingabe gedrückt wird.

Durch gemeinsames Drücken der Vorheriger- und Nächster-Titel-Taste oder der Bücherregal-Taste wechseln Sie zwischen SD-Karte, USB-Medium und CD. Dann drücken Sie die Vorheriger- oder Nächster-Titel-Taste, um einen Titel auszuwählen.

Für Informationen zum aktuellen Titel, wie Überschriften, Seiten und Lesezeichen, drücken Sie die Informationstaste einmal. So erhalten Sie auch Informationen zu Spieldauer und Akkustatus. Halten Sie die Taste gedrückt, werden Datum und Uhrzeit angesagt.

Anmerkung: Sagt der PLEXTALK Datum und Uhrzeit nicht korrekt an, stellen Sie sie, wie im Abschnitt "Datum und Uhrzeit einstellen" beschrieben, ein.

Zum direkten Anspringen einer Seite, drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal und geben dann die gewünschte Seitenzahl gefolgt von Eingabe ein.

Zum Anspringen einer Überschrift, drücken Sie die Gehe-zu-Taste zweimal und geben dann die gewünschte Überschriftennummer gefolgt von Eingabe ein.

Nutzen Sie die Lesezeichen-Funktion. Zum Hinzufügen eines Lesezeichens drücken Sie die Lesezeichentaste zweimal und geben dann eine Zahl zwischen 1 und 65000 ein. Sie können allerdings nur bis zu 10000 Lesezeichen setzen.

Zum Anspringen eines Ihrer Lesezeichen drücken Sie die Lesezeichentaste einmal, gefolgt von der gewünschten Lesezeichennummer und Eingabe.

Zum Entfernen eines Lesezeichens drücken Sie die Lesezeichentaste dreimal, gefolgt von der Nummer des zu entfernenden Lesezeichens und Eingabe. Alle Lesezeichen im aktuellen Titel entfernen Sie durch Eingeben der 0 gefolgt von Eingabe.

8. Den PLEXTALK einstellen.

Es ist sinnvoll, einige Einstellungen vorzunehmen, bevor der PLEXTALK benutzt wird. Zwar ist das Einstellen jederzeit möglich, sollte aber lieber gleich vorgenommen werden. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Sprachausgabe, Datum und Uhrzeit einstellen und einen Warteklang auswählen.

8.1. Sprachausgabenoptionen einstellen.

Der PLEXTALK verfügt über eine eigene Sprachausgabe, mit der Sie Titel im DAISY-nur-Text-Format, sowie TXT- und HTML-Dateien lesen können. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie Stimme und Tonhöhe der integrierten Sprachausgabe auswählen.

8.1.1. Sprachausgabestimme auswählen.

Sie können zwischen einer weiblichen (Muttersprache) und einer männlichen (Englischen) Sprachausgabenstimme wählen. Folgendermaßen können Sie eine der beiden Sprachausgabenstimmen auswählen:

Erinnerung: Die Menütaste ist oben links auf dem Gerät.

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Sprachausgabenstimme auswählen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 die bevorzugte Stimme aus und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8.
- Der PLEXTALK macht Ihre Auswahl zur neuen Standardeinstellung für die Sprachausgabe und verlässt das Menü. Wenn Sie die Sprachausgabenstimme wechseln, startet sich der PLEXTALK neu.

8.1.2. Tonhöhe der Sprachausgabe auswählen.

Folgendermaßen können Sie die Tonhöhe der integrierten Sprachausgabe einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Tonhöhe der Sprachausgabe einstellen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.

- Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 eine Tonhöhe zwischen -5 und +5 aus, wobei 0 die normale Tonhöhe ist, und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8.
- Der PLEXTALK macht Ihre Auswahl zur neuen Standardeinstellung und verlässt das Menü.

8.2. Datum und Uhrzeit einstellen.

Erinnerung: Um Datum und Uhrzeit ansagen zu lassen, halten Sie die Informationstaste gedrückt. Sie befindet sich zwischen Taste 6 und der Einschlaftaste.

Folgendermaßen können Sie Datum und Uhrzeit einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste und gehen mit Taste 4 oder 6 auf "Systemeinstellungen" und bestätigen dann mit Eingabe oder Taste 8.
- Wählen Sie den Eintrag "Datum und Uhrzeit einstellen" und bestätigen mit Eingabe oder Taste 8. Der PLEXTALK fordert Sie auf, die Jahreszahl 4stellig einzugeben und sagt die aktuelle Einstellung an.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Jahreszahl 4stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten. Mit Abbrechen können Sie die Eingabe löschen. Wenn Sie erneut Abbrechen drücken, verlassen Sie die Datums- und Uhrzeiteinstellung.
- Wenn Sie Ihre Eingabe bestätigen, Fordert Sie der PLEXTALK auf, den Monat einzugeben und sagt den aktuell eingestellten Monat an.
- Geben Sie auf dem Nummernblock den Monat 2stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten. Mit Abbrechen können Sie die Eingabe löschen. Wenn Sie erneut Abbrechen drücken, kehren Sie zur Jahreseinstellung zurück.
- Wenn Sie Ihre Eingabe bestätigen, Fordert Sie der PLEXTALK auf, den Tag einzugeben und sagt den aktuell eingestellten Tag an.

- Geben Sie auf dem Nummernblock den Tag 2stellig ein und drücken Eingabe, oder drücken Sie sofort Eingabe, um die aktuelle Einstellung beizubehalten. Mit Abbrechen können Sie die Eingabe löschen. Wenn Sie erneut Abbrechen drücken, kehren Sie zur Monateinstellung zurück.
- Wenn Sie Ihre Eingabe bestätigen, Fordert Sie der PLEXTALK auf, die Uhrzeit 4stellig einzugeben und weist darauf hin, dass Sie mit der Vor- oder Rückspultaste zwischen Vor- und Nachmittag wählen können. Dann wird noch die aktuell eingestellte Uhrzeit angesagt.
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Uhrzeit 4stellig ein, wenn nötig, mit vorangestellten Nullen, und drücken Eingabe. Mit Abbrechen können Sie die Eingabe löschen. Wenn Sie erneut Abbrechen drücken, kehren Sie zur Tageseinstellung zurück. Wenn Sie zwischen Vor- und Nachmittag auswählen möchten, drücken Sie vor dem Bestätigen die Vor- oder Rückspultaste.
- Datum und Uhrzeit sind jetzt korrekt eingestellt und der PLEXTALK verlässt den Menüpunkt automatisch. Zur Bestätigung werden Ihnen Datum und Uhrzeit noch einmal angesagt, so wie Sie sie eingestellt haben.

8.3. Warteklang auswählen.

Wenn der PLEXTALK arbeitet, z. B. Beim Zugriff auf ein Medium, hören Sie zur Bestätigung der Aktion einen Warteklang. Folgende Einstellungen stehen zur Auswahl: "Warteklang 1", "Warteklang 2" oder "Kein Warteklang".

Folgendermaßen können Sie einen Warteklang auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Warteklang auswählen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus. Der

PLEXTALK sagt an, welcher Warteklang gerade ausgewählt ist und spielt ihn dann ab.

- Bewegen Sie sich mit Taste 4 oder 6 durch die verschiedenen Warteklänge, und wenn Sie einen Warteklang gefunden haben, drücken Sie Eingabe oder Taste 8.
- Der PLEXTALK bestätigt Ihre Auswahl und verlässt das Menü.

9. Stromversorgung.

Bevor Sie anfangen, Dateien auf Ihrem PLEXTALK abzuspielen, sollten Sie sich mit den Funktionen zur Stromversorgung vertraut machen. Der PLEXTALK warnt Sie bei niedrigem Akkuladestand, und es gibt ein automatisches Abschalten und eine Einschlaffunktion. Diese Funktionen lernen Sie im Folgenden kennen.

9.1. Niedriger Ladestand.

Wenn der PLEXTALK über den Akku betrieben wird und der Ladestand so niedrig ist, dass der Akku aufgeladen werden muss, sagt der PLEXTALK "Niedriger Akkustand. Bitte ans Stromnetz anschließen" oder "Niedriger Akkustand. Der Player schaltet sich in einer Minute automatisch ab". Um den PLEXTALK weiterhin nutzen zu können, müssen Sie das Netzteil anschließen. Andernfalls schaltet sich der PLEXTALK automatisch ab, wenn der Ladestand einen bestimmten Punkt unterschreitet.

9.2. Automatisches Abschalten.

Um den Akku zu schonen, schaltet sich der PLEXTALK auch bei ausreichendem Ladestand automatisch ab, wenn er 15 Minuten lang nicht benutzt wird. Wenn Sie dies nicht wünschen, betätigen Sie einfach eine Funktion, wie Starten der Wiedergabe oder Aufrufen des Menüs. Der PLEXTALK

bleibt nun für weitere 15 Minuten eingeschaltet, bevor dieselbe Warnung erneut gesprochen wird.

Anmerkung: Wenn der PLEXTALK über das Stromnetz betrieben wird, schaltet er sich nicht automatisch ab.

9.3. Neustartfunktion.

Lässt sich der PLEXTALK einmal nicht abschalten oder reagiert nicht auf Tastatureingaben, ist die Neustartfunktion eine gute Alternative zum Herausnehmen des Akkus.

Um diese Funktion zu nutzen, halten Sie Einschlaftaste und Ein-/Aus-Taste mindestens 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Der PLEXTALK schaltet sich ab und wieder ein.

9.4. Einschlaffunktion.

Mit der Einschlaffunktion können Sie einen Zeitraum festlegen, nach dem sich der PLEXTALK abschalten soll. Dies ist sehr praktisch, wenn Sie ein DAISY-Buch oder Musik für eine vorher festgelegte Zeitspanne hören möchten. In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie Sie die Einschlaffunktion einstellen und abschalten können.

9.4.1. Einschlaffunktion einstellen.

Erinnerung: Die Einschlaftaste ist direkt über der Ein-/Aus-Taste.

Folgendermaßen können Sie die Einschlaffunktion einstellen:

- Drücken Sie die Einschlaftaste einmal. Der PLEXTALK sagt, "Einschlaffunktion. 15 Minuten. Gesetzt."
- Drücken Sie die Einschlaftaste erneut, um die Einschlafzeit zu erhöhen. Mit jedem Tastendruck erhöht sie sich um 15 Minuten, bis zum Höchstwert von einer Stunde. Drücken Sie

die Einschlaftaste immer wieder, bis die gewünschte Zeit erreicht ist.

9.4.2. Einschlauffunktion abschalten.

Folgendermaßen können Sie die Einschlauffunktion abschalten:

- Drücken Sie die Einschlaftaste. Der PLEXTALK sagt, dass die Einschlauffunktion eingeschaltet ist und nennt die Anzahl der bis zum Abschalten verbleibenden Minuten.
- Drücken Sie die Einschlaftaste immer wieder, bis der PLEXTALK "Aus" sagt.

10. Abspielfunktionen für alle Formate.

Alle in diesem Kapitel beschriebenen Funktionen gelten gleichermaßen für das Abspielen von DAISY-Titeln, Audio- und Text-Dateien. Zunächst sollen diese Begriffe jedoch für dieses Handbuch geklärt werden.

- Ein DAISY-Titel ist ein auf SD-Karte, USB-Medium oder CD gespeichertes DAISY-Buch. Die Speichermedien können einen oder mehrere DAISY-Titel enthalten. Jeder DAISY-Titel muss jedoch in einem eigenen Ordner abgespeichert werden. Die Audio-Dateien des DAISY-Titels müssen im Wave-, MP3- oder AMR-WB+-Format vorliegen.
- Audio-Dateien, die nicht zu einem DAISY-Titel gehören, können als Einzeldateien oder in einem Ordner auf SD-Karte, USB-Medium oder CD gespeichert werden. Der PLEXTALK kann folgende Audio-Formate erkennen und abspielen: MP3, Wave AMR-WB+ und Ogg Vorbis.
- Text-Dateien sind entweder im Nur-Text- oder im HTML-Format. Sie können als Einzeldateien oder in einem Ordner auf SD-Karte, USB-Medium oder CD gespeichert werden.

Damit Sie die folgenden Funktionen gleich ausprobieren können, sollten Sie zunächst eine SD-Karte, ein USB-Medium oder eine CD mit geeigneten Dateien einlegen, wie im Abschnitt 5.10 beschrieben.

ACHTUNG: Der PLEXTALK ist nur mit SD- und SDHC-Karten kompatibel. Andere Speichermedien wie Speicherstifte oder MMC (Multimedia-Karten) lösen Fehlfunktionen aus und sollten daher nicht angeschlossen werden.

10.1. SD-Karte, USB-Medium oder CD einlegen.

Wenn Sie eine SD-Karte, ein USB-Medium oder eine CD zum ersten Mal einlegen, spielt sie der PLEXTALK vom Anfang des ersten Titels an ab. Schließen Sie dasselbe Medium später erneut an, spielt der PLEXTALK, unabhängig vom Dateiformat, von der Stelle an ab, an der das letzte Mal gestoppt wurde. Diese Funktion ist besonders nützlich, wenn Sie SD-Karten, USB-Medien oder CDs häufig wechseln müssen, z. B., wenn Sie für Ihr Studium parallel in mehreren Büchern recherchieren.

10.2. Wiedergabe starten und stoppen.

Folgendermaßen können Sie die Wiedergabe starten und stoppen:

Erinnerung: Play-/Stop ist die rechteckige Taste mit Einkerbung zwischen Vor- und Rückspultaste.

- Um die Wiedergabe zu starten, drücken Sie Play-/Stop. Der PLEXTALK wird von der Stelle an abspielen, an der beim letzten Mal gestoppt wurde.
- Um die Wiedergabe zu stoppen, drücken Sie Play-/Stop.

Anmerkung: Ist ein Buch oder Album bis zum Ende gelaufen, wird automatisch gestoppt, sofern kein anderer Wiedergabemodus ausgewählt ist. Wenn Sie nach dem Abspielen eines Buchs oder Albums Play-/Stop drücken, wird wieder vom Anfang an abgespielt.

10.3. Abspiellautstärke einstellen.

Erinnerung: Der Lautstärkeregler, der aus Lauter- und Leiser-Taste besteht, ist ganz oben auf dem Gerät zwischen Geschwindigkeits- und Tonhöheregler.

Die Lautstärke kann auf einer Skala von 0 bis 25 in Einerschritten geregelt werden. 0 ist stumm und 25 die höchste Lautstärke.

- Zum Erhöhen der Abspiellautstärke drücken Sie die Lauter-Taste entweder mehrmals nach oben, wobei die Lautstärke jedes Mal um 1 erhöht wird, oder halten sie so lange nach oben gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.
- Zum Senken der Abspiellautstärke drücken Sie die Leiser-Taste entweder mehrmals nach unten, wobei die Lautstärke jedes Mal um 1 gesenkt wird, oder halten sie so lange nach unten gedrückt, bis die gewünschte Lautstärke erreicht ist.

Wenn der PLEXTALK gerade nichts abspielt, hören Sie bei jeder Veränderung der Lautstärke einen Piepton und die neue Lautstärke wird angesagt, z. B. "Lautstärke 16". Während der Wiedergabe ist aber nur der Piepton zu hören, die neue Lautstärke wird nicht angesagt.

Anmerkung: Bei jeder Veränderung der Lautstärke hören Sie einen Piepton. Am oberen und unteren Ende der Skala ist der Piepton höher, in der Mitte der Skala, bei Lautstärke 13, ist er tiefer.

Anmerkung: Wenn Sie die Lauter- oder Leiser-Taste gedrückt halten, verändern Sie die Lautstärke schnell in die gewünschte Richtung, ohne dass Sie die Taste mehrmals drücken müssen.

Anmerkung: Wenn Sie Lauter- und Leiser-Taste gleichzeitig drücken, kommen Sie zur Mitte der Skala, Lautstärke 13.

10.4. Lautstärke der Benutzerführung einstellen.

Der PLEXTALK verfügt zur Benutzerführung über eine interne Sprachausgabe. Deren Lautstärke kann entweder mit der

Abspiellautstärke oder unabhängig eingestellt werden. Wenn Sie Sprachausgaben- und Abspiellautstärke zusammen einstellen möchten, gehen Sie wie im vorherigen Abschnitt beschrieben vor. Die Sprachausgabenlautstärke wird dann lauter oder leiser, je nachdem, wie Sie die Wiedergabelautstärke einstellen.

Folgendermaßen können Sie die Lautstärke der Benutzerführung unabhängig einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeinstellungen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Lautstärke der Benutzerführung einstellen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Wählen Sie mit Taste 4 oder 6 eine Benutzerführungslautstärke und bestätigen die Einstellung mit Eingabe oder Taste 8. Der PLEXTALK übernimmt die neue Lautstärke für die Benutzerführung und verlässt das Menü.

10.5. Abspielgeschwindigkeit einstellen.

Es gibt 11 verschiedene Geschwindigkeiten, von -2 bis +8, die in Einerschritten eingestellt werden können. Die Normalgeschwindigkeit liegt bei Position 0. -2 ist halbe Geschwindigkeit, +4 die doppelte Geschwindigkeit und +8 die dreifache Geschwindigkeit.

- Zum Erhöhen der Abspielgeschwindigkeit, drücken Sie die Schneller-Taste. Wenn gerade keine Wiedergabe läuft, sagt der PLEXTALK die ausgewählte Geschwindigkeit an, z. B. "Geschwindigkeit +2". Eine laufende Wiedergabe wird unterbrochen, bis Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben.
- Zum Senken der Abspielgeschwindigkeit, drücken Sie die Langsamer-Taste. Wenn gerade keine Wiedergabe läuft, sagt der PLEXTALK die ausgewählte Geschwindigkeit an, z. B.

"Geschwindigkeit -1". Eine laufende Wiedergabe wird unterbrochen, bis Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben.

Anmerkung: Bei jeder Veränderung der Geschwindigkeit hören Sie einen Piepton. Am oberen und unteren Ende der Skala ist der Piepton höher, bei Normalgeschwindigkeit ist er tiefer.

Anmerkung: Wenn Sie die Schneller- oder Langsamer-Taste gedrückt halten, verändern Sie die Geschwindigkeit schnell in die gewünschte Richtung, ohne dass Sie die Taste mehrmals drücken müssen.

Anmerkung: Wenn Sie Schneller- und Langsamer-Taste gleichzeitig drücken, schalten Sie auf Normalgeschwindigkeit.

10.6. Tonhöhe einstellen.

Es gibt 13 mögliche Klangeinstellungen, von -6 bis +6, die in Einerschritten eingestellt werden können. Die Voreinstellung liegt in der Mitte und wird als Normalposition bezeichnet. Wenn Sie sich auf der Skala von ganz unten nach ganz oben bewegen, ändert sich der Klang von eher bassig hin zu eher höhenlastig.

- Zum Erhöhen der Tonhöhe, drücken Sie die Höher-Taste. Wenn gerade keine Wiedergabe läuft, sagt der PLEXTALK die ausgewählte Tonhöhe an, z. B. "Tonhöhe +5". Eine laufende Wiedergabe wird unterbrochen, bis Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben.
- Zum Senken der Tonhöhe, drücken Sie die Tiefer-Taste. Wenn gerade keine Wiedergabe läuft, sagt der PLEXTALK die ausgewählte Tonhöhe an, z. B. "Tonhöhe -3". Eine laufende Wiedergabe wird unterbrochen, bis Sie Ihre Einstellungen vorgenommen haben.

Anmerkung: Bei jeder Veränderung der Tonhöhe hören Sie einen Piepton. Am oberen und unteren Ende der Skala ist der Piepton höher, bei normalem Klang ist er tiefer.

Anmerkung: Wenn Sie die Höher- oder Tiefer-Taste gedrückt halten, verändern Sie die Tonhöhe schnell in die gewünschte Richtung, ohne dass Sie die Taste mehrmals drücken müssen.

Anmerkung: Wenn Sie Höher- und Tiefer-Taste gleichzeitig drücken, kommen Sie zur Normalposition.

10.7. Das Navigationsmenü.

Eine der nützlichsten Funktionen des PLEXTALK ist die Möglichkeit einzustellen, wie Sie navigieren möchten. Dies geschieht über das Navigationsmenü, das Sie immer erreichen können, wenn Sie sich nicht bereits im Menü befinden.

Folgendermaßen können Sie das Navigationsmenü nutzen:

- Vorausgesetzt, Sie befinden sich nicht im Menü, können Sie sich mit den Tasten 2 und 8 nach oben und unten bewegen. Die Optionen des Navigationsmenüs, die Ihnen in diesem Moment zur Verfügung stehen, werden angesagt.
- Welche Optionen zur Verfügung stehen, hängt von den genutzten Inhalten und der Datenstruktur ab. Können z. B. in einem DAISY-Titel keine Seitenzahlen angesprungen werden, erscheint diese Option auch nicht im Navigationsmenü. Der PLEXTALK bietet Ihnen also nur die Navigationsoptionen an, die Ihnen auch tatsächlich zur Verfügung stehen.
- Haben Sie Ihre bevorzugte Navigationsmethode gewählt, können Sie sich mit den Tasten 4 und 6 auf der gewählten Navigationsebene vor und zurück bewegen. Wählen Sie z. B. im integrierten Benutzerhandbuch mit Taste 2 oder 8 die Option "Ebene 1", können Sie sich mit den Tasten 4 und 6 vor und zurück, zur nächsten Überschrift auf Ebene 1, bewegen.

Anmerkung: Die Voreinstellung ist für DAISY-Titel "Ebene 1", für Audiodateien "Track" und für Textdateien "Absatz". Ausgewählte Navigationsebenen werden beim Abschalten nicht gespeichert.

Anmerkung: Wenn Sie einmal nicht wissen, welche Navigationsoptionen Ihnen gerade zur Verfügung stehen, finden Sie es durch wiederholtes Drücken der Taste 2 oder 8 schnell heraus.

10.8. Anordnung der Dateien und Ordner auf dem PLEXTALK.

Am Anfang dieses Kapitels haben Sie Grundsätzliches über die Dateiformate erfahren, die der PLEXTALK abspielen kann und ihre Speicherung auf SD-Karte, USB-Medium, internem Speicher oder CD. Werden diese einfachen Regeln eingehalten, funktioniert der PLEXTALK mit ganz wenigen Einschränkungen zur Speicherung der Dateien, die Sie nutzen möchten.

Greift der PLEXTALK auf SD-Karte, USB-Medium oder CD zu, wird der Inhalt automatisch ausgewertet und die Einträge in "DAISY-Titel", "Audio-" und "Textdateien" eingeteilt, unabhängig von ihrem Speicherort auf dem Medium. Bewegen Sie sich dann durch die Titel, sind Sie bereits geordnet, unabhängig davon, wo auf dem Medium sie sich befinden.

Haben Sie z. B. 3 Textdateien im Stammverzeichnis und 2 Weitere in einem Unterverzeichnis, zeigt der PLEXTALK sie als 5 Textdateien in 2 Ordnern an.

Audiodateien sortiert der PLEXTALK genauso, ordnet sie aber zusätzlich in einem gemeinsamen Ordner an, was die Titelauswahl erleichtert. Sind also 10 Audiodateien im Stammverzeichnis, 5 Weitere in Ordner A und 5 Weitere in Ordner B, erkennt der PLEXTALK, dass sie sich in 3 Ordnern befinden, ordnet diese 3 Ordner aber noch einmal in einem Gesamtordner "Audio" an, wenn Sie zwischen Titeln navigieren.

DAISY-Titel sollten mit allen zugehörigen Dateien in einem Ordner abgespeichert sein. Der PLEXTALK überprüft nicht die Inhalte von Unterordnern eines Ordners, in dem ein DAISY-Buch gefunden wurde.

Dass der PLEXTALK Medieninhalte automatisch überprüfen kann, ermöglicht eine besonders flexible Anordnung von Informationen, wobei Sie gleichzeitig bei Bedarf schnell darauf zugreifen können.

10.9. SD-Karte, USB-Medium oder CD auswählen.

Folgendermaßen können Sie zwischen den verschiedenen Medientypen wechseln:

- Drücken Sie die Nächster- und Vorheriger-Titel-Taste gleichzeitig oder drücken Sie die Bücherregal-Taste, so oft nacheinander, bis das gewünschte Medium angesagt wird. Der PLEXTALK bewegt sich nacheinander durch die 3 möglichen Optionen, "SD-Karte", "USB" und "CD". Zuerst wird der Eintrag des Mediums angesagt, der zuletzt abgespielt wurde.
- Wenn kein Medium vorhanden ist, sagt der PLEXTALK "SD-Karte (USB-Medium oder CD) nicht gefunden", und dann "Kein Titel ausgewählt. Bitte wählen Sie einen anderen Titel aus".
- Wird das gewünschte Medium angesagt, können Sie sich mit der Nächster- oder Vorheriger-Titel-Taste durch seine verfügbaren Inhalte bewegen.
- Stehen Sie auf dem Eintrag, den Sie abspielen möchten, drücken Sie Play-/Stop und die Wiedergabe beginnt an der Stelle, an der sie zuletzt gestoppt wurde.

10.10. Informationen zu SD-Karte, USB-Medium oder CD abrufen.

Sicher möchten Sie hin und wieder den Status von SD-Karte, USB-Medium oder CD überprüfen. Folgendermaßen können Sie eine Reihe von Informationen abrufen:

- Stellen Sie zunächst sicher, dass der PLEXTALK auf das gewünschte Medium zugreift, indem Sie die Nächster- und Vorheriger-Titel-Taste oder die Bücherregal-Taste so oft nacheinander gleichzeitig drücken, bis das Richtige angesagt wird.
- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medienverwaltung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medien- und Titelinformationen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Der PLEXTALK sagt nun Medientyp, freien und belegten Speicherplatz, Gesamtgröße des Mediums, sowie Größe und weitere Informationen zum aktuellen Eintrag an. Bei SD-Karten wird auch angesagt, ob die Karte gesperrt ist.
- Wenn Sie die gewünschten Informationen bekommen haben, verlassen Sie das Menü mit Eingabe.

Anmerkung: Je nach Status von SD-Karte, USB-Medium oder CD werden möglicherweise nicht alle Informationen angesagt. Haben Sie z. B. Eine fertige CD eingelegt, wird keine Information zu freiem Speicherplatz gegeben, da er ja nicht zur Verfügung steht.

10.11. Vor- und Zurückspulen.

Zum Vor- und Zurückspulen nutzen Sie die Vor- und Rückspultaste zu beiden Seiten der Play-/Stoptaste.

- Zum Zurückspulen halten Sie die Rückspultaste gedrückt. Wenn Sie sie loslassen, startet die Wiedergabe.
- Zum Vorspulen halten Sie die Vorspultaste gedrückt. Wenn Sie sie loslassen, startet die Wiedergabe.

Wenn Sie bei DAISY-Büchern mit Audioinhalten oder Audio-Dateien die Vor- oder Rückspultaste gedrückt halten, wird in Schritten von 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 20 Minuten, und so weiter gespult. Wird die Taste vor der Ansage, "10 Minuten", losgelassen, startet die Wiedergabe an der Stelle, an der die Taste losgelassen wird. Wird die Taste nach diesem Punkt losgelassen, wird weiter vor- oder zurückgespult, bis der Vorgang durch Drücken von Play-/Stop beendet wird. Die Wiedergabe startet dann automatisch. Bei Nur-Text-DAISY-Büchern wird in Schritten von 5 Phrasen, 10 Phrasen, 15 Phrasen und so weiter vor- oder zurückgespult. Wenn Sie die Taste loslassen, startet die Wiedergabe. Bei Text-Dateien wird in Schritten

von 5 Sätzen, 10 Sätzen, 15 Sätzen und so weiter vor- oder zurückgespult. Wenn Sie die Taste loslassen, startet die Wiedergabe.

10.12. Lesezeichen.

Mit Lesezeichen können Sie sich noch flexibler durch DAISY-Titel, Audio- oder Textdateien bewegen. Im Folgenden erfahren Sie, welche Arten von Lesezeichen zur Verfügung stehen und wie sie gesetzt, angesprungen und gelöscht werden.

10.12.1. Arten von Lesezeichen.

Beim PLEXTALK können Sie die beiden folgenden Lesezeichenarten nutzen:

- Nummerierte Lesezeichen - Sie können bis zu 10000 nummerierte Lesezeichen setzen. Jedem Lesezeichen wird eine eigene Nummer zwischen 1 und 65000 zugewiesen. Wenn Sie versuchen, die 10000er-Grenze zu überschreiten, wird das älteste Lesezeichen automatisch gelöscht, bevor ein Neues erstellt wird.
- Fortsetzungslesezeichen - Bei allen Titeln, Alben oder Textdateien wird die aktuelle Abspielposition gespeichert, so dass beim nächsten Abspielen des Titels, Albums oder der Textdatei wieder dort gestartet werden kann.

Anmerkung: Der PLEXTALK kann sich Fortsetzungslesezeichen für bis zu 1000 Titel, Alben oder Textdateien merken.

10.12.2. Lesezeichen setzen.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie nummerierte Lesezeichen in Titel oder Alben einfügen können.

Erinnerung: Die Lesezeichentaste ist unten links auf dem Gerät.

Folgendermaßen erhalten Sie Informationen zu den Lesezeichen im aktuellen Titel, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Informationstaste einmal und der PLEXTALK sagt Verschiedenes an, unter anderem Informationen über nummerierte Lesezeichen im aktuellen Titel.
- Drücken Sie die Informationstaste mehrmals nacheinander, um sich schnell durch die angesagten Informationen zu bewegen.
- Wenn Sie die gewünschten Informationen gehört haben, beenden Sie die Sprache mit Eingabe.

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen einfügen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste 2mal. Der PLEXTALK sagt, "Lesezeichen hinzufügen".
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer ein, die Sie dem Lesezeichen zuweisen möchten.
- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.
- Wenn Sie versuchen, eine bereits vorhandene Nummer zu vergeben, können Sie entweder das alte Lesezeichen überschreiben oder eine andere Nummer vergeben. Um das alte Lesezeichen zu überschreiben, drücken Sie Eingabe, oder vergeben Sie eine neue Nummer mit Abbrechen.
- Wenn Sie Ihrem Lesezeichen eine gültige Nummer zugewiesen haben, bestätigt der PLEXTALK, dass das Lesezeichen gesetzt wurde.

Anmerkung: Der PLEXTALK lässt kein zweites Lesezeichen auf einer Position zu, auf der bereits eines gesetzt wurde.

Anmerkung: Fortsetzungslesezeichen setzt der PLEXTALK automatisch, wenn Sie ihn abschalten, oder Titel, Album oder Datei wechseln. Sie müssen gar nichts machen.

10.12.3. Lesezeichen anspringen.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie nummerierte Lesezeichen angesprungen werden.

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen anspringen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Lesezeichentaste einmal. Der PLEXTALK sagt: "Gehe zu Lesezeichen".
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des Lesezeichens ein, das Sie anspringen möchten.
- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.
- Wenn Sie eine gültige Lesezeichennummer eingegeben haben, springt der PLEXTALK das Lesezeichen an, und die Wiedergabe startet automatisch.

Anmerkung: Der PLEXTALK spricht eine Fehlermeldung, wenn Sie versuchen, ein nicht vorhandenes nummeriertes Lesezeichen anzuspringen.

Wenn Sie einem Titel, Album oder einer Datei Lesezeichen hinzugefügt haben, erscheint auch ein Punkt "Lesezeichen" im Navigationsmenü. Folgendermaßen können Sie zum Lesezeichen mit der nächsthöheren oder nächstniedrigeren Nummer springen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Lesezeichen" im Navigationsmenü.
- Gehen Sie mit Taste 4 zum Lesezeichen mit der nächstniedrigeren Nummer. Der PLEXTALK springt zum Lesezeichen und sagt seine Nummer an. Die Wiedergabe startet automatisch. Wenn Sie auf dem Lesezeichen mit der niedrigsten Nummer stehen, springen Sie mit Taste 4 zum Lesezeichen mit der höchsten Nummer.
- Gehen Sie mit Taste 6 zum Lesezeichen mit der nächsthöheren Nummer. Der PLEXTALK springt zum Lesezeichen und sagt seine Nummer an. Die Wiedergabe startet automatisch. Wenn Sie auf dem Lesezeichen mit der höchsten Nummer stehen, springen Sie mit Taste 6 zum Lesezeichen mit der niedrigsten Nummer.

Anmerkung: Bei dieser Vorgehensweise bewegen Sie sich nach Nummern geordnet durch die Lesezeichen, nicht nach dem Zeitpunkt, zu dem sie im Titel, Album oder der Datei auftauchen. Angenommen Sie haben in einem Titel, Album oder einer Datei willkürlich Lesezeichennummern von 1 bis 10 vergeben und befinden sich nun auf Lesezeichen 5. Auf die oben beschriebene Weise können Sie nun Lesezeichen 4 oder 6 anspringen, unabhängig davon, wo sie sich befinden, auch wenn sich zwischen den Nummern 4 und 5 oder 5 und 6 noch andere Lesezeichen befinden.

Anmerkung: Gibt es für einen Titel keine Lesezeichen, erscheint auch kein Punkt "Lesezeichen" im Navigationsmenü.

10.12.4. Lesezeichen löschen.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einzelne oder alle Lesezeichen des aktuellen Titels löschen können.

Folgendermaßen können Sie ein nummeriertes Lesezeichen löschen

- Drücken Sie die Lesezeichentaste 3mal. Der PLEXTALK sagt "Lesezeichen entfernen".
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des Lesezeichens ein, das Sie entfernen möchten.
- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.
- Zum Löschen aller Lesezeichen des aktuellen DAISY-Titels oder der aktuellen Text-Datei drücken Sie die Taste 0 gefolgt von Eingabe. Bei Musikdateien löschen Sie auf diese Weise alle Lesezeichen aller Alben des aktuellen Mediums.
- Wenn Sie Ihre Eingabe bestätigen, löscht der PLEXTALK die ausgewählten Lesezeichen und spricht eine Bestätigung.

Anmerkung: Wenn Sie eine ungültige Lesezeichennummer eingeben, spricht der PLEXTALK eine Fehlermeldung.

10.13. Die integrierte Hilfe.

Der PLEXTALK verfügt über eine eingebaute Hilfedatei, auf die Sie jederzeit zugreifen können. Zwar ist nicht das gesamte Benutzerhandbuch enthalten, aber immerhin die wichtigsten Kapitel, in denen Sie vielleicht nachschlagen möchten, während Sie Ihren PLEXTALK benutzen. Die Datei ist im DAISY 3 Nur-Text-Format und wird von der internen, synthetischen Sprachausgabe vorgelesen.

10.13.1. Auf die integrierte Hilfe zugreifen.

Folgendermaßen können Sie auf die integrierte Hilfe zugreifen:

- Drücken Sie die Taste 0 einmal.
- Der PLEXTALK öffnet die Hilfedatei an der Stelle, an der Sie sie bei der letzten Benutzung verlassen haben.
- Bewegen Sie sich in der Datei, wie in anderen DAISY Nur-Text-Titeln. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie im nächsten Kapitel.

Folgendermaßen können Sie die Hilfedatei verlassen:

- Drücken Sie entweder die Taste 0 einmal oder Drücken Sie die Nächster- und Vorheriger-Titel-Taste gleichzeitig, um ein anderes Medium auszuwählen.

10.13.2. Informationen aus der Hilfedatei entnehmen.

Folgendermaßen können Sie Informationen aus der Hilfedatei abrufen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Informationstaste einmal.
- Verschiedene Informationen werden angesagt. Details, siehe unten

- Wenn Sie nicht alle Informationen hören, sondern sich schnell zu bestimmten Einträgen bewegen möchten, drücken Sie die Informationstaste mehrmals nacheinander.
- Wenn Sie die gewünschten Informationen gehört haben, können Sie die Ansage mit Eingabe stoppen.

In der Hilfedatei erhalten Sie Informationen zu:

- Stromversorgung - Stromquelle, Akkustand.
- Seiten.
- Überschriften.
- Lesezeichen.
- Abspieleinstellung.

11. DAISY-Titel abspielen.

In diesem Kapitel werden Funktionen behandelt, die Ihnen beim Abspielen von DAISY-Titeln zusätzlich zur Verfügung stehen. Es wäre daher hilfreich, diese gleich an einem DAISY-Titel auszuprobieren. Das Benutzerhandbuch eignet sich gut dazu, weil es viele der in diesem Kapitel beschriebenen DAISY-Funktionen enthält.

ACHTUNG: Der PLEXTALK ist nur mit SD- und SDHC-Karten kompatibel. Andere Speichermedien wie Speicherstifte oder MMC lösen Fehlfunktionen aus und sollten daher nicht angeschlossen werden.

11.1. Überschrifts-, Seiten- und Titelinformationen abrufen.

Folgendermaßen können Sie Informationen zum aktuellen DAISY-Titel abrufen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Informationstaste einmal.
- Verschiedene Informationen werden angesagt. Details siehe unten

- Wenn Sie nicht alle Informationen hören, sondern sich schnell zu bestimmten Einträgen bewegen möchten, drücken Sie die Informationstaste mehrmals nacheinander.
- Wenn Sie die gewünschten Informationen gehört haben, können Sie die Ansage mit Eingabe stoppen.

In einem DAISY-Audiotitel erhalten Sie Informationen zu:

- Stromversorgung - Stromquelle, Akkustand.
- Zeit - Abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit und Gesamtspieldauer.
- Seiten.
- Überschriften.
- Lesezeichen.
- Titel.
- Aufnahme datum.
- Abspieleinstellung.

Während der Ansage wird jeweils die erste Phrase des aktuellen Titels und des aktuellen Abschnitts abgespielt, so dass Sie Titel und Ihre Position im Titel leichter erkennen können.

Anmerkung: Wenn die Abspielposition am Anfang oder Ende des Titels ist, hören Sie nichts, da an diesen Stellen nichts aufgenommen wurde.

In einem DAISY-Texttitel erhalten Sie Informationen zu:

- Stromversorgung - Stromquelle, Akkustand.
- Seiten.
- Überschriften.
- Lesezeichen.
- Titel.
- Aktualisiertes Datum.
- Abspieleinstellung.

Anmerkung: Wenn der DAISY-Titel Titel- oder Sonderseiten enthält, wird ihre Anzahl mit den übrigen Seiteninformationen genannt.

Anmerkung: Der PLEXTALK unterstützt Titel, die mehrere Bände umfassen. Gibt es mehr als einen Band, wird die Nummer des aktuellen Bandes, gefolgt von der Gesamtanzahl der Bände angesagt.

11.2. Überschriftsnavigation.

In DAISY-Titeln können Überschriften auf 2 Arten angesprungen werden. Sie können entweder direkt zu einer bestimmten Überschrift gehen oder die vorhandenen Überschriften nacheinander anspringen.

Erinnerung: Überschriften sind Markierungen im DAISY-Titel, die Sie eventuell schnell erreichen möchten, z. B. Anfänge von Kapiteln, Abschnitten und Unterabschnitten. Die Überschriften des DAISY-Titels werden vom Titelanfang an fortlaufend nummeriert. Jeder Überschrift ist eine Navigationsebene zwischen 1 und 6 zugeordnet.

Erinnerung: Die Gehe-zu-Taste ist die Zweituntere in der Viererreihe auf der linken Seite des Geräts.

Folgendermaßen können Sie eine bestimmte Überschrift direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste 2mal. Die Sprachausgabe sagt, "Gehe zu Überschrift".
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer der gewünschten Überschrift ein.
- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.
- Wenn Sie eine gültige Überschriftennummer eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zur gewählten Überschrift und die Wiedergabe startet automatisch. Wenn Sie eine ungültige Überschriftennummer eingegeben haben, wird eine Fehlermeldung gesprochen.

Folgendermaßen können Sie unter Nutzung der Überschriftsebenen die Überschriften nacheinander anspringen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 auf die gewünschte Navigationsebene, also Ebene 1, Ebene 2, und so weiter.
- Gehen Sie mit Taste 4 auf die vorherige Überschrift der gewählten Ebene. Der PLEXTALK springt zur Überschrift und die Wiedergabe startet automatisch. Wenn es keine vorherige Überschrift gibt, springt der PLEXTALK an den Anfang und sagt "Titelanfang".
- Gehen Sie mit Taste 6 auf die nächste Überschrift der gewählten Ebene. Der PLEXTALK springt zur Überschrift und die Wiedergabe startet automatisch. Wenn es keine nächste Überschrift gibt, springt der PLEXTALK an das Ende und sagt "Titelende".

Anmerkung: Wenn Sie sich auf diese Weise durch die Überschriften bewegen, zeigt der PLEXTALK alle Überschriften auf der gewählten oder auf höheren Ebenen an. Bewegen Sie sich z. B. Auf Ebene 3, werden beim Vor- oder Zurückspringen alle Überschriften auf Ebene 1, 2 und 3 gefunden. Haben Sie dagegen Ebene 1 gewählt, werden auch nur Überschriften der Ebene 1 gefunden.

11.3. Anfang oder Ende eines DAISY-Titels anspringen.

Den Anfang oder das Ende des aktuellen DAISY-Titels schnell anspringen zu können, kann sehr nützlich sein.

Folgendermaßen können Sie den Anfang eines DAISY-Titels anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste 2mal. Die Sprachausgabe sagt, "Gehe zu Überschrift". Danach wird angesagt, dass Sie mit Eingabe zum Titelanfang springen können.
- Drücken Sie Eingabe und Sie springen zum Anfang des aktuellen Titels. Die Sprachausgabe sagt "Titelanfang".
- Nach einer kurzen Pause startet die Wiedergabe automatisch am Titelanfang.

Folgendermaßen können Sie das Ende eines DAISY-Titels anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste 2mal. Die Sprachausgabe sagt, "Gehe zu Überschrift". Danach wird angesagt, dass Sie mit Taste 0 gefolgt von Eingabe zum Titelanfang springen können.
- Drücken Sie die Taste 0 gefolgt von Eingabe und Sie springen zum Ende des aktuellen Titels. Die Sprachausgabe sagt "Titelende".

11.4. Seitennavigation.

Die Seitennavigation ist der Überschriftsnavigation sehr ähnlich. Sie können entweder bestimmte Seitenzahlen direkt anspringen oder sich nacheinander durch die vorhandenen Seiten bewegen. Im PLEXTALK werden die Seiten vom Titelanfang an fortlaufend nummeriert.

Folgendermaßen können Sie eine bestimmte Seite direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal. Die Sprachausgabe sagt, "Gehe zu Seite".
- Geben Sie auf dem Nummernblock die gewünschte Seitenzahl ein.
- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.
- Wenn Sie eine gültige Seitenzahl eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zur gewählten Seite und die Wiedergabe startet automatisch. Wenn Sie eine ungültige Seitenzahl eingegeben haben, wird eine Fehlermeldung gesprochen.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Seiten bewegen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Seite" im Navigationsmenü.
- Mit Taste 4 gehen Sie zur vorherigen Seite. Der PLEXTALK springt zur Seitenmarkierung und die Wiedergabe startet

automatisch. Wenn Sie die Taste 4 gedrückt halten, springen Sie in 10-Seiten-Schritten zurück.

- Mit Taste 6 gehen Sie zur nächsten Seite. Der PLEXTALK springt zur Seitenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch. Wenn Sie die Taste 6 gedrückt halten, springen Sie in 10-Seiten-Schritten vorwärts.

Anmerkung: Gibt es in einem Titel keine Seitenmarkierungen, wird im Navigationsmenü auch kein Eintrag "Seite" angezeigt.

Anmerkung: Es gibt folgende 3 Seitentypen: Normal-, Titel- und Sonderseiten. Titelseiten sind die Seiten am Anfang des Buches, bevor die Seitennummerierung beginnt. Sonderseiten sind keine Titelseiten, werden aber auch nicht in der fortlaufenden Nummerierung einbezogen. Titel- oder Sonderseiten können nicht direkt mit der Gehe-Zu-Taste angesprungen werden, sondern nur mit den Tasten 4 und 6, wenn im Navigationsmenü "Seite" ausgewählt ist.

11.5. Gruppennavigation.

Erinnerung: Beim PLEXTALK ist eine Gruppe eine Navigationsmöglichkeit, die der Ersteller wichtigen Stellen im DAISY-Titel, unabhängig von anderen Navigationsmöglichkeiten wie Überschriften oder Seiten, zuweisen kann.

Gruppen können nur fortlaufend angesprungen werden. Der PLEXTALK springt dann alle Überschriften und Gruppen nacheinander an.

Folgendermaßen können Sie sich zur nächsten oder vorherigen Gruppe bewegen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Gruppe" im Navigationsmenü.
- Mit Taste 4 gehen Sie zur vorherigen Gruppe. Der PLEXTALK springt zur Gruppenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch. Wenn es keine vorherige Gruppe gibt, springt der PLEXTALK an den Anfang und sagt "Titelanfang".

- Mit Taste 6 gehen Sie zur nächsten Gruppe. Der PLEXTALK springt zur Gruppenmarkierung und die Wiedergabe startet automatisch. Wenn es keine nächste Gruppe gibt, springt der PLEXTALK an das Ende und sagt "Titelende".

Anmerkung: Gibt es in einem Titel keine Gruppenmarkierungen, wird im Navigationsmenü auch kein Eintrag "Gruppe" angezeigt.

11.6. Phrasennavigation.

Erinnerung: Phrasen sind DAISY-Navigationselemente, die während der Aufnahme automatisch erstellt werden. Eine Phrase ist die Aufnahme zwischen zwei Pausen.

- Um eine Phrase zurückzuspringen, drücken Sie die Taste 2 oder 8 und wählen im Navigationsmenü den Eintrag "Phrase" und drücken dann die Taste 4. Der PLEXTALK springt zum Anfang der vorherigen Phrase und die Wiedergabe startet automatisch. Oder drücken Sie einfach die Rückspultaste, um eine Phrase zurück zu springen.
- Um eine Phrase vorzuspringen, Drücken Sie die Taste 2 oder 8 und wählen im Navigationsmenü den Eintrag "Phrase" und drücken dann die Taste 6. Der PLEXTALK springt zum Anfang der nächsten Phrase und die Wiedergabe startet automatisch. Oder drücken Sie einfach die Vorspultaste, um eine Phrase weiter zu springen.

Anmerkung: Abhängig davon, wie lange die Wiedergabe einer Phrase bereits läuft, müssen Sie eventuell die Taste 4 zweimal schnell hintereinander drücken, um zur vorherigen Phrase zu springen, sonst springt der PLEXTALK eventuell nur zum Anfang der aktuellen Phrase.

11.7. Wiedergabeeinstellung.

Bei DAISY-Titeln können Sie zwischen den beiden folgenden Wiedergabemodi wählen:

- Normale Wiedergabe - ist voreingestellt. Der Titel wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt. Dann sagt der PLEXTALK "Titelende". Drücken Sie nun Play-/Stop, wird wieder vom Anfang an abgespielt.
- Titel wiederholen - der aktuelle Titel wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

Folgendermaßen können Sie einen Wiedergabemodus auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Wiedergabeeinstellung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus. Der ausgewählte Wiedergabemodus wird angesagt.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 auf den gewünschten Wiedergabemodus und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Ihre Einstellung wird übernommen, und Sie verlassen das Menü automatisch.

12. Audiodateien und Musik-CDs abspielen.

In diesem Kapitel werden die spezifischen Funktionen für die Wiedergabe von Audiodateien oder Musik-CDs behandelt. Sie haben sehr viel mit den Einstellmöglichkeiten bei DAISY-Titeln gemeinsam, so dass Sie sie sicher schnell lernen werden. Nehmen Sie doch eine SD-Karte, ein USB-Medium oder eine CD mit Dateien im korrekten Audioformat, oder auch eine Musik-CD und probieren die neuen Funktionen gleich aus.

Erinnerung: In diesem Handbuch bezieht sich "Audiodateien" auf am PC oder IC-Recorder erstellte Dateien.

ACHTUNG: Der PLEXTALK ist nur mit SD- und SDHC-Karten kompatibel. Andere Speichermedien wie Speicherstifte oder MMC

lösen Fehlfunktionen aus und sollten daher nicht angeschlossen werden.

ACHTUNG: Der PLEXTALK kann Musik-CDs, die nicht mit dem CD Digital Audio (CD-DA) Standard kompatibel sind, eventuell nicht abspielen, was bei kopiergeschützten Musik-CDs der Fall sein kann.

12.1. Über Audiodateien.

In diesem Abschnitt erhalten Sie technische Informationen zu den Audiodateiformaten, die Sie auf dem PLEXTALK abspielen können. Folgende Dateitypen stehen zur Verfügung:

- MP3-Dateien - MP3 ist ein Standard für das Komprimieren von Audiodateien. Kompressionsraten von 1/10 (ein Zehntel) oder sogar 1/12 (ein Zwölftel) sind in Musik-CD-Qualität möglich. Der PLEXTALK unterstützt folgende Bitraten: MPEG1 Layer 3 von 32kbps bis 320kbps und MPEG2 Layer 3 von 8kbps bis 160kbps. Außerdem VBR (Variable Bitrate).

Anmerkung: Bei VBR ist die Ansage der abgelaufenen und verbleibenden Zeit ungenau, sollte also nur als Schätzung betrachtet werden.

- Wave-Dateien - Wave ist das Standardaudioformat von Microsoft. Der PLEXTALK unterstützt nur Wave-Dateien im PCM-Format (Pulse Code Modulation).
- AMR-WB+ - Ein Standard zur Komprimierung von Audiodaten. Der PLEXTALK unterstützt alle Bitraten dieses Audiostandards.
- Ogg Vorbis-Dateien - Ogg Vorbis ist ein Patentfreies Format zur Audiokomprimierung mit Bitraten von 45kbps bis 320kbps. Der PLEXTALK unterstützt alle Ogg Vorbis-Bitraten.

12.2. Wiedergabeabfolge.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, in welcher Reihenfolge Dateien und Ordner abgespielt werden.

- Dateiwiedergabe - Der PLEXTALK spielt die Dateien nach Dateinamen geordnet ab, wobei Zahlen Vorrang vor Buchstaben haben. Heißt z. B. Eine Datei "123ABC" und eine Andere "ABC", wird Datei "123ABC" vor Datei "ABC" abgespielt.
- Ordnerwiedergabe - Befindet sich auf SD-Karte oder USB-Medium mehr als ein Ordner, werden die Audiodateien nach Ordnernamen geordnet abgespielt.

Beispiel:

Im Stammverzeichnis sind Ordner 1, Ordner 4 und Datei A.

In Ordner 1 sind Ordner 2, Ordner 3 und Datei B.

In Ordner 2 sind Datei E und Datei F.

In Ordner 3 sind Datei G und Datei H.

In Ordner 4 sind Datei C und Datei D.

In diesem Beispiel werden die Dateien in folgender Reihenfolge abgespielt: A, B, E, F, G, H, C. D.

12.3. Einschränkungen bei Audiodateien.

Für das Abspielen von Audio-Dateien von SD-Karte, USB-Medium oder CD gelten folgende Einschränkungen:

Einschränkungen für die Anzahl von Dateien und Ordnern:

- Die maximale Anzahl Dateien, die in einem Ordner gespeichert werden können, ist 1024. Darüber hinaus werden keine Dateien erkannt.

- Die maximale Anzahl Dateien, die auf einem Medium gespeichert werden können, ist 6000. Darüber hinaus werden keine Dateien erkannt.
- Die maximale Anzahl Ordner ist 1024, ein Stammverzeichnis eingeschlossen. Darüber hinaus werden keine Ordner erkannt.
- Der PLEXTALK behandelt Dateiodner als Alben und erkennt bis zu 8 Hierarchieebenen, ein Stammverzeichnis eingeschlossen.
- Enthält ein Ordner ein DAISY-Buch, durchsucht der PLEXTALK seinen Inhalt nicht.

Anmerkung: Bei einer größeren Anzahl Ordner braucht der PLEXTALK eventuell länger zum Lesen der Daten.

12.4. Datei- und Albuminformationen abrufen.

Folgendermaßen können Sie Informationen zum aktuellen Track oder Album abrufen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Informationstaste einmal.
- Verschiedene Informationen werden angesagt. Details siehe unten.
- Wenn Sie nicht alle Informationen hören, sondern sich schnell zu bestimmten Einträgen bewegen möchten, drücken Sie die Informationstaste mehrmals nacheinander.
- Wenn Sie die gewünschten Informationen gehört haben, können Sie die Ansage mit Eingabe stoppen.

In einer Audio-Datei erhalten Sie Informationen zu:

- Stromversorgung - Stromquelle, Akkustand.
- Zeit - Abgelaufene Zeit, verbleibende Zeit und Gesamtspieldauer.
- Track.
- Album.
- Lesezeichen.

- Titel - Audio
- Abspieleinstellung.

12.5. Tracknavigation.

Die Tracknavigation ist der Seitennavigation sehr ähnlich. Sie können entweder einen bestimmten Track direkt anspringen oder sich nacheinander durch die vorhandenen Tracks bewegen. Die Tracks werden vom Albumanfang an fortlaufend nummeriert.

Folgendermaßen können Sie einen bestimmten Track direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal. Die Sprachausgabe sagt, "Gehe zu Track".
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des gewünschten Tracks ein.
- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.
- Wenn Sie eine gültige Tracknummer eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zum gewählten Track und die Wiedergabe startet automatisch. Wenn Sie eine ungültige Tracknummer eingegeben haben, wird eine Fehlermeldung gesprochen.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Tracks bewegen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Track" im Navigationsmenü.
- Mit Taste 4 gehen Sie zum vorherigen Track. Der PLEXTALK springt zum Track und die Wiedergabe startet automatisch.
- Mit Taste 6 gehen Sie zum nächsten Track. Der PLEXTALK springt zum Track und die Wiedergabe startet automatisch.
- Oder drücken Sie einfach die Rückspultaste, um zum vorherigen Track zu springen. Mit der Vorspultaste springen Sie zum nächsten Track.

Anmerkung: Wird ein Track mehr als 3 Sekunden lang abgespielt, während Sie sich Track für Track rückwärts bewegen, springen Sie beim nächsten Zurückgehen an den Anfang des aktuellen Tracks. Bewegen Sie sich innerhalb von 3 Sekunden noch einmal rückwärts, so springen Sie zum vorherigen Track.

Anmerkung: Die oben beschriebene Navigationsweise hängt von der Anzahl der Alben und dem gewählten Wiedergabemodus ab. Sie befinden sich zum Beispiel im Standardmodus und haben mehr als ein Album. Haben Sie den letzten Track des aktuellen Albums erreicht und springen einen Track vorwärts, springt der PLEXTALK zum ersten Track des nächsten Albums, und sagt nicht "Albumende".

12.6. Zum Albumanfang springen.

Den Anfang des aktuellen Albums schnell anzuspringen kann sehr nützlich sein.

Folgendermaßen können Sie zum Albumanfang springen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal. Die Sprachausgabe sagt, "Gehe zu Track". Danach wird angesagt, dass Sie mit Eingabe zum Anfang springen können.
- Drücken Sie Eingabe und Sie springen zum Anfang des aktuellen Eintrags. Die Sprachausgabe sagt "Albumanfang".
- Nach einer kurzen Pause startet die Wiedergabe automatisch am Anfang.

12.7. Albumnavigation.

Die Albumnavigation ist der Tracknavigation sehr ähnlich. Sie können entweder ein bestimmtes Album direkt anspringen oder sich nacheinander durch die vorhandenen Alben bewegen.

Folgendermaßen können Sie ein bestimmtes Album direkt anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste zweimal. Die Sprachausgabe sagt "Gehe zu Album".
- Geben Sie auf dem Nummernblock die Nummer des gewünschten Albums ein.
- Drücken Sie Eingabe zum Bestätigen oder Abbrechen zum Löschen Ihrer Eingabe.
- Wenn Sie eine gültige Albumnummer eingegeben und mit Eingabe bestätigt haben, springt der PLEXTALK zum gewählten Album und die Wiedergabe startet automatisch. Wenn Sie eine ungültige Albumnummer eingegeben haben, wird eine Fehlermeldung gesprochen.

Folgendermaßen können Sie sich nacheinander durch die vorhandenen Alben bewegen:

- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum Eintrag "Album" im Navigationsmenü.
- Mit Taste 4 gehen Sie zum vorherigen Album. Der PLEXTALK springt zum vorherigen Album, sagt dessen Nummer an und die Wiedergabe startet automatisch.
- Mit Taste 6 gehen Sie zum nächsten Album. Der PLEXTALK springt zum nächsten Album, sagt dessen Nummer an und die Wiedergabe startet automatisch.

12.8. Wiedergabemodus auswählen.

Bei Audiodateien können Sie zwischen verschiedenen Wiedergabemodi wählen. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung:

- Normale Wiedergabe - ist voreingestellt. Das Album wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt. Dann sagt der PLEXTALK "Albumende". Drücken Sie nun Play-/Stop, wird das Album wieder vom Anfang an abgespielt.
- Track wiederholen - der aktuelle Track wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

- Album wiederholen - das aktuelle Album wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.
- Alle Alben wiederholen - alle Alben werden fortlaufend wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.
- Zufallswiederholung – Die Dateien aller Alben werden fortlaufend in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

Folgendermaßen können Sie einen Wiedergabemodus auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Wiedergabeeinstellung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus. Der ausgewählte Wiedergabemodus wird angesagt.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 auf den gewünschten Wiedergabemodus und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Ihre Einstellung wird übernommen, und Sie verlassen das Menü automatisch.

Anmerkung: Der ausgewählte Wiedergabemodus bleibt so lange für Audiodateien als Standard voreingestellt, bis Sie ihn wieder ändern, auch wenn das Gerät aus- und wieder eingeschaltet wird.

13. Textdateien abspielen.

Erinnerung: In diesem Handbuch sind Textdateien entweder Nur-Text- oder HTML-Dateien. Audioaufnahmen werden nicht als Textdateien erkannt. Der PLEXTALK nutzt automatisch die eingebaute Sprachausgabe, wenn Textdateien aufgerufen werden.

Das Abspielen von Textdateien im PLEXTALK ist dem Abspielen von DAISY-Titeln sehr ähnlich, doch dieses Kapitel geht auf einige wichtige Unterschiede ein.

13.1. Informationen zur Textdatei abrufen.

Folgendermaßen können Sie Informationen zur aktuellen Textdatei abrufen, unabhängig davon, ob die Wiedergabe läuft:

- Drücken Sie die Informationstaste einmal.
- Verschiedene Informationen werden angesagt. Details siehe unten
- Wenn Sie nicht alle Informationen hören, sondern sich schnell zu bestimmten Einträgen bewegen möchten, drücken Sie die Informationstaste mehrmals nacheinander.
- Wenn Sie die gewünschten Informationen gehört haben, können Sie die Ansage mit Eingabe stoppen.

In einer Text-Datei erhalten Sie Informationen zu:

- Stromversorgung - Stromquelle, Akkustand.
- Aktuelle Position – als Prozentangabe.
- Lesezeichen.
- Titel.
- Aktualisiertes Datum.
- Abspieleinstellung.

13.2. Unterschiede zwischen Nur-Text- und HTML-Dateien.

Zwar werden in diesem Handbuch sowohl Nur-Text- als auch HTML-Dateien als Textdateien bezeichnet, doch sollten Sie folgende Unterschiede zwischen den beiden Dateitypen beachten, da sie Ihre Navigationsmöglichkeiten beeinflussen.

Nur-Text-Dateien haben lediglich die Struktur ihrer eigenen Absätze, Sätze, Wörter und Zeichen. Es gibt keine weiteren Strukturelemente, wie z. B. Überschriften. HTML-Dateien verfügen über Absatz-, Satz-, Wort- und Zeichennavigation, können aber auch Informationen zur Überschriftsebene enthalten, wenn diese im Original-HTML-Dokument vorhanden sind. Wenn es Überschriften gibt, bieten sie Ihnen eine zusätzliche Navigationsmöglichkeit.

Anmerkung: Selbst wenn die HTML-Datei Überschriften verschiedener Ebenen enthält, wird Ihnen nur eine Überschriftsebene zur Navigation angeboten. Mit anderen Worten: alle Überschriften einer HTML-Datei werden wie Ebene-1-Überschriften behandelt.

13.3. Navigation nach Prozentangabe.

In Textdateien können Sie sich nicht, wie in DAISY-Büchern, direkt zu Überschriften, Seiten oder Gruppen bewegen. Diese Optionen stehen daher auch nicht zur Verfügung, wenn Sie die Gehe-Zu-Taste drücken. Es ist jedoch möglich, mit dem PLEXTALK zu einem Prozentwert der abgelaufenen Datei zu springen.

Folgendermaßen können Sie nach Prozentangaben navigieren:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal. Die Sprachausgabe sagt "Gehe zu Prozent".
- Geben Sie einen Wert zwischen 0 und 100% ein und drücken dann Eingabe.
- Der PLEXTALK springt zur gewählten Position in der Text-Datei.
- Wenn Sie versehentlich einen Wert über 100% eingeben, springt der PLEXTALK ans Ende der Textdatei.

13.4. Anfang oder Ende einer Textdatei anspringen.

Den Anfang oder das Ende einer Text-Datei schnell anspringen zu können, kann sehr nützlich sein.

Folgendermaßen können Sie den Anfang einer Text-Datei anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal. Die Sprachausgabe sagt "Gehe zu Prozent".

- Drücken Sie die Taste 0 gefolgt von Eingabe, und der PLEXTALK springt an den Anfang der Text-Datei. Die Sprachausgabe sagt "0 Prozent. Titelanfang".
- Nach einer kurzen Pause startet die Wiedergabe automatisch am Dateianfang.

Folgendermaßen können Sie das Ende einer Text-Datei anspringen:

- Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal. Die Sprachausgabe sagt "Gehe zu Prozent".
- Drücken Sie die Tasten "1", "0", "0" gefolgt von Eingabe, und der PLEXTALK springt an das Ende der Text-Datei. Die Sprachausgabe sagt "100 Prozent. Titelerde". Die Wiedergabe stoppt automatisch.
- Wenn Sie versehentlich einen Wert über 100% eingeben, springt der PLEXTALK an das Ende der Textdatei.

13.5. Navigation nach Absatz, Satz, Wort oder Zeichen.

Wie oben erwähnt, haben Sie in Textdateien immer die 4 Navigationsoptionen "Absatz", "Satz", "Wort" und "Zeichen". Diese Einträge erscheinen automatisch im Navigationsmenü, wenn Sie eine Textdatei aufrufen.

Folgendermaßen können Sie nach einer dieser Optionen navigieren:

- Wählen Sie mit Taste 2 oder 8 die gewünschte Navigationsform aus, also Absatz, Satz, Wort oder Zeichen.
- Mit Taste 4 bewegen Sie sich in der Datei um die gewählte Einheit zurück.
- Mit Taste 6 bewegen Sie sich in der Datei um die gewählte Einheit vorwärts.
- Drücken Sie einfach die Rückspultaste, um zum vorherigen Absatz zu springen. Mit der Vorspultaste springen Sie zum nächsten Absatz.

13.6. Überschriftsnavigation (nur HTML-Dateien).

Wenn HTML-Dateien mit Überschriften versehen sind, finden Sie zusätzlich einen Eintrag "Ebene" im Navigationsmenü. Anders als beim Navigieren in DAISY-Titeln gibt es hier jedoch nur einen Eintrag für alle Überschriftsebenen. Enthält also eine HTML-Datei Überschriften der Ebenen 1, 2 und 3, gibt es im Navigationsmenü trotzdem nur den Eintrag "Ebene". Sie können sich nicht auf einer bestimmten Überschriftsebene bewegen.

Folgendermaßen können Sie Überschriften anspringen:

- Wählen Sie mit Taste 2 oder 8 den Eintrag "Ebene" im Navigationsmenü.
- Mit Taste 4 springen Sie zur vorherigen Überschrift. Wenn Sie den Dateianfang erreichen, sagt der PLEXTALK "Titelanfang".
- Mit Taste 6 springen Sie zur nächsten Überschrift. Wenn Sie das Dateiende erreichen, sagt der PLEXTALK "Titelende".

13.7. Wiedergabemodus.

Bei Textdateien können Sie zwischen den beiden folgenden Wiedergabemodi wählen:

- Normale Wiedergabe - ist voreingestellt. Der Titel wird bis zum Ende abgespielt, und danach wird gestoppt. Dann sagt der PLEXTALK "Titelende". Drücken Sie nun Play-/Stop, wird wieder vom Anfang an abgespielt.
- Titel wiederholen - der aktuelle Titel wird so lange wiederholt, bis die Wiedergabe gestoppt wird.

Folgendermaßen können Sie einen Wiedergabemodus auswählen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Wiedergabeeinstellung" und wählen ihn mit Eingabe oder

Taste 8 aus. Der ausgewählte Wiedergabemodus wird angesagt.

- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 auf den gewünschten Wiedergabemodus und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Ihre Einstellung wird übernommen, und Sie verlassen das Menü automatisch.

14. Medienverwaltung.

Mit dem PLEXTALK können Sie Ihre Daten sichern und Titel löschen. In diesem Kapitel erfahren Sie, wie dies für DAISY-Titel, Audio- und Textdateien funktioniert und werden auf Einschränkungen bei diesen Funktionen hingewiesen.

14.1. Verfügbare Medien.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, mit welchen Medien der PLEXTALK arbeiten kann. Folgende Medientypen stehen zur Verfügung:

SD-Karte, USB-Medium:

- Zum Abspielen von DAISY-Inhalten, Audio- und Textdateien.
- Zum Kopieren von Dateien auf anderen Medien.

CD:

- Zum Abspielen von DAISY-Inhalten, Audio- und Textdateien.

Anmerkung: Enthält eine CD verschiedene Inhalte, wie zum Beispiel DAISY-Inhalte und Audio-Dateien, erkennt der PLEXTALK nur einen Inhaltstyp.

Anmerkung: Ein externes USB-CD-/DVD-Laufwerk kann nicht mit dem PLEXTALK benutzt werden.

14.2. Titel löschen.

Mit dem PLEXTALK können Sie Titel, Alben oder Text-Dateien von SD-Karte oder USB-Medium löschen.

Folgendermaßen können Sie einen Titel löschen:

- Gehen Sie auf den Titel, den Sie löschen möchten.
- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medienverwaltung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Ausgewählten Titel löschen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Der PLEXTALK bittet Sie nun, zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.

Anmerkung: Von CDs können keine Titel gelöscht werden.

14.3. Allgemeines zum Kopieren.

Vor jedem Kopiervorgang sollten Sie Folgendes beachten:

- Während des Kopierens von Daten heißt das Medium, von dem die Daten kommen, "Quellmedium", und das Medium, auf das kopiert oder verschoben wird, "Zielmedium."
- Sie können verschiedene Datentypen von CD auf andere Medien kopieren, doch das CD-Laufwerk kann nur als Quellmedium zum Kopieren genutzt werden.
- Wenn Sie eine Musik-CD kopieren, können Sie die Kompressionsrate selbst bestimmen. Sie wird dann in Form von Audiodateien, und nicht im DAISY-Format gespeichert.
- Sie können verschiedene Datentypen zwischen SD-Karte und USB-Medium kopieren.

- Falls auf dem Zielmedium zu wenig Speicherplatz zum Kopieren vorhanden ist, spricht der PLEXTALK eine Warnmeldung.

14.4. DAISY-Titel kopieren.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie DAISY-Titel von einem Medium zum Anderen kopieren können.

14.4.1. DAISY-Titel von CD kopieren.

Folgendermaßen können Sie einen DAISY-Titel von CD auf ein anderes Medium kopieren:

- Wenn Sie auf SD-Karte oder USB-Medium kopieren möchten, schließen Sie ein Zielmedium mit ausreichend freiem Speicherplatz an. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte entsperrt ist.
- Schieben Sie die Quell-CD in den CD-Schlitz.
- Gehen Sie auf der CD zu dem DAISY-Titel, den Sie kopieren möchten.
- Drücken Sie die Taste 9 einmal, um die Kopierfunktion aufzurufen.
- Der PLEXTALK sagt, "Zielmedium auswählen". Drücken Sie die Taste 4 oder 6, um zwischen SD-Karte oder USB-Medium auszuwählen und bestätigen dann mit Eingabe oder Taste 8.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten. Drücken Sie erneut Eingabe oder Taste 8, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Wenn Sie fortfahren, wird der Kopiervorgang gestartet. Der PLEXTALK meldet, wenn die Kopie abgeschlossen ist.

Anmerkung: Wenn auf dem Zielmedium nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, sagt der PLEXTALK an, wie viel Speicher benötigt wird.

Anmerkung: Die Kopierzeit hängt von der Größe des Quelltitels und der Anzahl der Dateien ab.

Anmerkung: Falls Sie das Kopieren zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

14.4.2. DAISY-Titel kopieren.

Folgendermaßen können Sie einen DAISY-Titel zwischen SD-Karte und USB-Medium kopieren:

- Schieben Sie SD-Karte und USB-Medium ein. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte entsperrt ist.
- Gehen Sie auf dem Quellmedium zu dem DAISY-Titel, den Sie kopieren möchten.
- Drücken Sie die Taste 9 einmal, um die Kopierfunktion aufzurufen.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten. Drücken Sie erneut Eingabe oder Taste 8, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Wenn Sie fortfahren, wird der Kopiervorgang gestartet. Der PLEXTALK meldet, wenn das Kopieren abgeschlossen ist.

Anmerkung: Wenn auf dem Zielmedium nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, sagt der PLEXTALK an, wie viel Speicher benötigt wird.

Anmerkung: Die Dauer des Kopiervorgangs hängt von der Größe des Quelltitels und der Anzahl der Dateien ab.

Anmerkung: Falls Sie das Kopieren zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

14.5. Audiodateien/Musik-CDs kopieren.

Mit dem PLEXTALK können Sie Audio-Dateien von einem Medium zum Anderen kopieren, auch komplette Alben. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie vorgehen müssen.

14.5.1. Audio-Dateien/Musik-CDs kopieren.

Folgendermaßen können Sie Audio-Dateien/Musik-CDs auf ein anderes Medium kopieren:

- Wenn Sie ein Album auf SD-Karte oder USB-Medium kopieren möchten, schließen Sie ein Zielmedium mit ausreichend freiem Speicherplatz an. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte entsperrt ist.
- Schieben Sie die Quell-CD in den CD-Schlitz.
- Wenn es mehrere Alben gibt, gehen Sie auf das Album, das Sie kopieren möchten.
- Drücken Sie die Taste 9 einmal um die Kopierfunktion aufzurufen.
- Der PLEXTALK sagt, "Zielmedium auswählen". Drücken Sie die Taste 4 oder 6, um ein Zielmedium auszuwählen und bestätigen dann mit Eingabe oder Taste 8.
- Wenn Sie von Musik-CD kopieren, wählen Sie mit Taste 4 oder 6 eine Kompressionsrate und bestätigen Ihre Auswahl mit Eingabe oder Taste 8.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten. Drücken Sie erneut Eingabe oder Taste 8, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Wenn Sie fortfahren, wird der Kopiervorgang gestartet. Der PLEXTALK meldet, wenn die Kopie abgeschlossen ist.

Anmerkung: Sie haben nur beim Kopieren von Musik-CDs die Möglichkeit, eine Kompressionsrate zu wählen.

Anmerkung: Wenn auf dem Zielmedium nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, sagt der PLEXTALK an, wie viel Speicher benötigt wird.

Anmerkung: Die Kopierzeit hängt von der Größe des Quelltitels und der Anzahl der Dateien ab. Lesen Sie hierzu den Abschnitt "Kopierzeit bei Musik-CDs".

Anmerkung: Falls Sie das Kopieren zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

14.5.2. Audio-Dateien kopieren.

Folgendermaßen können Sie eine Audio-Datei zwischen SD-Karte und USB-Medium kopieren:

- Schieben Sie SD-Karte und USB-Medium ein. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte entsperrt ist.
- Gehen Sie auf dem Quellmedium zu dem Album, das Sie kopieren möchten.
- Drücken Sie die Taste 9 einmal um die Kopierfunktion aufzurufen.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten. Drücken Sie erneut Eingabe oder Taste 8, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Wenn Sie fortfahren, wird der Kopiervorgang gestartet. Der PLEXTALK meldet, wenn das Kopieren abgeschlossen ist.

Anmerkung: Wenn auf dem Zielmedium nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist, sagt der PLEXTALK an, wie viel Speicher benötigt wird.

Anmerkung: Die Dauer des Kopiervorgangs hängt von der Größe des Quelltitels und der Anzahl der Dateien ab.

Anmerkung: Falls Sie das Kopieren zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

14.5.3. Kopierzeit bei Musik-CDs.

Die unten stehenden, ungefähren Kopierzeiten gelten für die verschiedenen verfügbaren Sampling- und Bitraten:

Kopieren von etwa 70 Minuten Audio von Musik-CD auf SD-Karte:

- PCM 44,1kHz Stereo: Etwa 80 Minuten.
- MP3 256K Stereo: Etwa 50 Minuten.
- MP3 128K Stereo: Etwa 40 Minuten.

Anmerkung: Alle Zeiten sind Schätzungen. Die Dauer des Kopiervorgangs hängt von der Größe des Quelltitels, der Anzahl der Dateien und der Schreibgeschwindigkeit der SD-Karte ab.

14.6. Textdateien kopieren.

In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie Text-Dateien von einem Medium zum Anderen kopieren können.

14.6.1. Text-Dateien von CD kopieren.

Folgendermaßen können Sie eine Text-Datei von CD auf ein anderes Medium kopieren:

- Wenn Sie eine Text-Datei auf SD-Karte oder USB-Medium kopieren möchten, schließen Sie ein Zielmedium mit ausreichend freiem Speicherplatz an. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte entsperrt ist.
- Schieben Sie die Quell-CD in den CD-Schlitz.
- Gehen Sie auf der CD zu der Text-Datei, die Sie kopieren möchten.
- Drücken Sie die Taste 9 einmal um die Kopierfunktion aufzurufen.
- Der PLEXTALK sagt, "Zielmedium auswählen". Drücken Sie die Taste 4 oder 6, um ein Zielmedium auszuwählen und bestätigen dann mit Eingabe oder Taste 8.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten. Drücken Sie erneut Eingabe oder Taste 8, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Wenn Sie fortfahren, wird der Kopiervorgang gestartet. Der PLEXTALK meldet, wenn das Kopieren abgeschlossen ist.

Anmerkung: Falls Sie das Kopieren zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

14.6.2. Text-Dateien kopieren.

Folgendermaßen können Sie eine Text-Datei zwischen SD-Karte und USB-Medium kopieren:

- Schieben Sie SD-Karte und USB-Medium ein. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte entsperrt ist.
- Gehen Sie auf dem Quellmedium zu der Text-Datei, die Sie kopieren möchten.
- Drücken Sie die Taste 9 einmal um die Kopierfunktion aufzurufen.
- Der PLEXTALK fragt, ob Sie mit dem Kopieren fortfahren möchten. Drücken Sie erneut Eingabe oder Taste 8, um fortzufahren, oder Abbrechen zum Abbrechen.
- Wenn Sie fortfahren, wird der Kopiervorgang gestartet. Der PLEXTALK meldet, wenn das Kopieren abgeschlossen ist.

Anmerkung: Falls Sie das Kopieren zwischendurch abbrechen möchten, drücken Sie Abbrechen.

14.7. SD-Karte löschen.

Mit dem PLEXTALK können Sie SD-Karten löschen, so oft Sie möchten. Folgendermaßen können Sie eine SD-Karte löschen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Medienverwaltung" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "SD-Karte löschen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Der PLEXTALK bittet Sie nun, zu bestätigen, dass Sie mit dem Formatieren fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe oder brechen mit Abbrechen ab.
- Wenn Sie fortfahren, wird der Formatiervorgang gestartet. Der PLEXTALK meldet, wenn die Formatierung abgeschlossen ist.

Anmerkung: Nachdem die SD-Karte gelöscht ist, verhält sich der PLEXTALK, als hätten Sie eine leere SD-Karte eingelegt.

Anmerkung: Wenn die Funktion "SD-Karte löschen" ausgeführt wird, werden alle Daten von der SD-Karte gelöscht.

15. Weitere nützliche Funktionen.

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie Sie die Systemeigenschaften überprüfen und die Überspringen-Funktion einstellen können.

15.1. Anzeige der Systemeigenschaften.

Wenn Sie Ihren Händler kontaktieren, fragt dieser eventuell nach Version und/oder Seriennummer Ihres PLEXTALK. Die Systemversion ist die Version der internen Firmware, und die Seriennummer ist die spezielle Identifikationsnummer Ihres PLEXTALK.

Folgendermaßen können Sie ganz einfach Systemversion oder Seriennummer Ihres PLEXTALK herausfinden:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Systemeigenschaften" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Systemversion und Seriennummer werden fortlaufend angesagt.
- Sobald Sie die gewünschten Informationen bekommen haben, verlassen Sie das Menü mit Eingabe oder Taste 8.

Anmerkung: Die Seriennummer ist außerdem auf der Geräteunterseite aufgedruckt.

15.2. Überspringen.

In manchen DAISY-Büchern können Einträge übersprungen werden. Sie können selbst entscheiden, was Sie überspringen möchten. Die Funktion dazu heißt "Überspringen." Folgende Einträge können übersprungen werden:

- Seitenzahlen
- Fußnoten
- Referenzpunkte
- Anmerkungen
- Zeilennummern
- Navigationsleiste
- Anmerkungen des Herstellers

Folgendermaßen können Sie die Überspringen-Funktion einstellen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Überspringen" und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Gehen Sie mit Taste 2 oder 8 zum jeweiligen Eintrag und Wählen mit Taste 4 oder 6 zwischen "Überspringen" und "Abspielen".
- Nachdem Sie für alle Einträge entschieden haben, ob sie übersprungen werden sollen, drücken Sie Eingabe. Dann macht der PLEXTALK Ihre Auswahl zur neuen Grundeinstellung und verlässt das Menü.

15.3. Alle Einstellungen des PLEXTALK auf Standard zurücksetzen.

Wenn Sie einmal alle Einstellungen des PLEXTALK auf Standard zurücksetzen müssen, ist dies ganz einfach möglich. In diesem Abschnitt erfahren Sie, welches die Standardeinstellungen sind, und

wie Sie den PLEXTALK in den Auslieferungszustand zurückversetzen können.

15.3.1. Standardeinstellungen.

Hier eine Liste aller Standardeinstellungen des PLEXTALK. Mit der Funktion "Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen" werden alle aufgelisteten Einstellungen auf die hier angegebenen Werte zurückgesetzt.

- Wiedergabelautstärke (Hauptlautstärke): 13
- Wiedergabegeschwindigkeit: Normal
- Wiedergabeklang: Normal
- Wiedergabemodus: Normale Wiedergabe
- Überspringen: Abspielen
- Lautstärke der Benutzerführung: Normal
- Stimme: Sprachenabhängig
- Warteklang auswählen: Warteklang 1
- Tonhöhe der Sprachausgabe: Normal

15.3.2. Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen.

Folgendermaßen können Sie alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen:

- Drücken Sie die Menütaste einmal, um in das Hauptmenü zu gelangen.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag „Systemeinstellungen“ und wählen ihn mit Eingabe oder Taste 8 aus.
- Gehen Sie mit Taste 4 oder 6 zum Eintrag "Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen" und wählen ihn mit Eingabe aus.
- Der PLEXTALK bittet Sie nun, zu bestätigen, dass Sie fortfahren möchten. Bestätigen Sie mit Eingabe, dass Sie alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen möchten, oder brechen mit Abbrechen ab.
- Nach kurzer Zeit startet sich der PLEXTALK neu.

Anhang A - Hauptspezifikationen.

Anmerkung: Shinano Kenshi behält sich das Recht vor, die Produktspezifikationen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

In diesem Abschnitt werden die Hauptspezifikationen des PLEXTALK PTN2 benannt.

Allgemeine Spezifikationen.

CD-Laufwerk:

Automatischer Einzug

Kompatible CDs:

CD, CD-R und CD-RW mit 12cm Durchmesser. Der PLEXTALK ist nur mit runden 12cm CDs kompatibel. 8cm CDs und anders geformte CDs, zum Beispiel im Visitenkartenformat, lösen Fehlfunktionen aus und sollten daher nicht benutzt werden.

SD-Kartenschlitz:

SD-/SDHC-Karte

Abspielbare Inhalte:

Bücher nach DAISY 2.0-, 2.02- und 3.0-Standard

Audio-Dateien der Formate MP3, AMR-WB+, Ogg Vorbis und Wave (PCM)

Musik-CDs (CD-DA)

Abspielbare Audioformate in DAISY-Büchern:

MP3, AMR-WB+, DAISY ADPCM2, PCM.

Audio-Ein- und Ausgänge:

Kopfhöreranschluss (Stereo)

Eingebauter Lautsprecher (Mono)

Extern angeschlossene Laufwerke:
USB 2.0

Uhr-Genauigkeit:
Ungefähr 60 Sekunden pro Monat

Stromquelle:
Netzteil, Wechselstrom 100 Volt bis 240 Volt, 50 oder 60 Hertz

Größe und Gewicht:
Länge 219 mm
Breite 170 mm
Höhe 56 mm
Gewicht ungefähr 1300 Gramm

Maximaler Stromverbrauch:
25 Watt

Arbeitstemperatur und -Feuchtigkeit:
40 bis 104 Grad Fahrenheit
5 bis 40 Grad Celsius
Feuchtigkeit 20 bis 80%, keine Nässe.

Audioeigenschaften.

Kopfhörer (Line-Ausgang):
Kompatible Impedanz 32 Ohm asymmetrisch
Anschluss Stereo Mini mit 3,5 mm Durchmesser

Eingebauter Lautsprecher:
Ausgangsimpedanz 4 Ohm
Ausgang 2,0 Watt

Hauptfunktionen.

Benutzerführung:

Spricht Informationen zum jeweiligen Vorgang
Beschreibt Tastenfunktionen in der Tastaturhilfe
Spricht Menüeinträge
Spricht Hilfe und Informationen (Nach Drücken der Informationstaste)

Suchfunktion:

DAISY-Buch: Überschrift, Gruppe, Seite, Phrase, Lesezeichen
Audio: Album, Track, Lesezeichen
Text-Datei: Absatz, Satz, Wort, Zeichen, Lesezeichen
HTML-Datei: Überschrift, Absatz, Satz, Wort, Zeichen, Lesezeichen

Lautstärkeregelung:

0 bis 25 (in Einerschritten)

Lautstärkeregelung der Benutzerführung:

-5 bis +5 (in Einerschritten)

Geschwindigkeitsregelung:

11 Einstellungen von -2, über 0, bis +8 (in Einerschritten).

Normalgeschwindigkeit ist 0.

-2 ist halbe Geschwindigkeit, +4 doppelte Geschwindigkeit, +8 dreifache Geschwindigkeit.

Klangregelung:

13 Einstellungen von -6, über 0, bis +6 (in Einerschritten)

Normaler Klang ist 0

Speicherfunktion:

Lesezeichen, maximal 10000

Akkuspezifikationen.

Typ: Ni-MH (Nickel-Metal Hydride)

Abmessungen

Länge 53,64 mm

Breite 56,68 mm

Höhe 29,00 mm

Kapazität: 1800 mAh (Milli-Amperestunden)

Ladezeit: Ungefähr 4 (TBD) Stunden

Laufzeit:

DAISY-Format, CD-Wiedergabe, 5 Stunden

Musik-CD (CD-DA) Format, CD-Wiedergabe, 2 Stunden

DAISY-Format, Wiedergabe von SD-Karte, 8 Stunden

Anmerkung: Alle Zeitangaben sind Schätzungen.

Anmerkung: Lade- und Laufzeit hängen von Umgebungstemperatur und -bedingungen ab.

Copyrighthinweise zu Ogg Vorbis.

Diese Software wird von den Urheberrechts-Inhabern UND DEN Mitwirkenden ohne

jegliche ausdrückliche oder konkludente Gewährleistung zur Verfügung

gestellt, einschließlich der, jedoch nicht beschränkt auf, die konkludente

Gewährleistung der Verwendbarkeit der Software für einen bestimmten Zweck.

Die Xiph.org Foundation oder die Mitwirkenden sind keinesfalls für irgendwelche direkten, indirekten, zufälligen, besonderen, exemplarischen,

oder Folgeschäden (unter Anderem Verschaffen von Ersatzgütern oder -Dienstleistungen; Einschränkung der Nutzungsfähigkeit; Verlust der Nutzungsfähigkeit; Datenverlust; Gewinnverlust oder Betriebsunterbrechung), wie diese auch immer verursacht wurden, und welcher Haftungstheorie diese auch immer unterliegen, ob bei Vertrags-, bei verschuldensunabhängiger Haftung oder durch unerlaubte Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit) verantwortlich, auf welche Art sie auch immer durch die Benutzung dieser Software entstanden sein mögen. Dies gilt auch dann, wenn sie auf die Möglichkeit eines solchen Schadens hingewiesen wurden.

Anhang B - Menühierarchie.

In diesem Anhang werden alle Einträge des Hauptmenüs, sowie die zugehörigen Unterpunkte aufgelistet.

Damit Sie die Einträge auch in den elektronischen Versionen dieses Handbuchs schnell finden können, wurden folgende Standards eingehalten:

- Hauptmenüeinträge stehen immer in einem neuen Absatz, sind in Großbuchstaben geschrieben und als Überschriften dritten Grades, linksbündig formatiert. Ihnen folgt am Zeilenende ein Doppelpunkt ":".
- Bei Menü-Unterpunkten ist der jeweils erste Buchstabe groß geschrieben. Sie sind normal formatiert und vom linken Rand um eins eingerückt. Ihnen geht ein Pluszeichen "+" voran.
- Bei Menüeinträgen auf Ebene 3 ist der jeweils erste Buchstabe groß geschrieben. Sie sind normal formatiert und vom linken Rand um zwei eingerückt. Ihnen geht kein Zeichen voran.

WIEDERGABEEINSTELLUNGEN (DAISY-Titel und Text-Dateien):

- +Normale Wiedergabe
- +Titel wiederholen

WIEDERGABEEINSTELLUNGEN (Audio-Dateien):

- +Normale Wiedergabe
- +Track wiederholen
- +Album wiederholen
- +Alle Alben wiederholen
- +Zufallswiederholung

ÜBERSPRINGEN:

- +Seitenzahl auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- +Fußnote Auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- +Referenzpunkt auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- +Anmerkung auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- +Zeilennummer auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- +Navigationsleiste auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen
- +Anmerkung des Herstellers auswählen
 - Abspielen
 - Überspringen

MEDIENVERWALTUNG:

- +Medien- und Titelinformation
- +SD-Karte löschen
- +Ausgewählten Titel (Ausgewähltes Album) löschen

SYSTEMEINSTELLUNGEN:

- +Systemeigenschaften
 - Systemversion
 - Seriennummer
- +Lautstärke der Benutzerführung einstellen (-5 bis +5)
- +Sprachausgabenstimme auswählen
 - Weiblich (Muttersprache)
 - Männlich (Englisch)
- +Warteklang auswählen

Warteklang 1

Warteklang 2

Kein Warteklang

+Datum und Uhrzeit einstellen

+Tonhöhe der Sprachausgabe einstellen (-5 bis +5)

+ Alle Einstellungen auf Standard zurücksetzen

Anhang C - Fehlerbehebung.

Allgemeine Betriebsstörungen.

Problem: Sie drücken die Ein-/Aus-Taste, aber das Gerät schaltet sich nicht ein.

Mögliche Ursache: Netzteil ist nicht richtig am PLEXTALK oder der Steckdose angeschlossen.

Lösung: Stecken Sie das Kabel noch einmal fest in den PLEXTALK und in die Steckdose.

Problem: Der PLEXTALK ist eingeschaltet, funktioniert aber nicht.

Mögliche Ursache: Tastensperre ist eingeschaltet.

Lösung: Schalten Sie die Tastensperre durch gleichzeitiges Drücken der Vor- und Rückspultaste aus.

Problem: Der PLEXTALK schaltet sich nicht aus und reagiert nicht auf Tastatureingaben.

Mögliche Ursache: Unbekannter Fehler.

Lösung: Halten Sie Einschloftaste und Ein-/Aus-Taste mindestens 10 Sekunden lang gleichzeitig gedrückt. Der PLEXTALK schaltet sich ab und wieder ein. Funktioniert dies nicht, müssen Sie den PLEXTALK vom Stromnetz trennen und den Akku herausnehmen und wieder einlegen, beziehungsweise ihn wieder an das Stromnetz anschließen.

Problem: Ein Track oder Album wird wiederholt abgespielt.

Mögliche Ursache: Eine Wiederholungseinstellung ist ausgewählt.

Lösung: Wählen Sie im Menü unter "Wiedergabeeinstellungen" "Normale Wiedergabe" aus.

Problem: Die Benutzerführung spricht nicht.

Mögliche Ursache 1: Die Lautstärke ist auf '0' gestellt.

Lösung: Erhöhen Sie die Lautstärke, bis Sie die Sprachausgabe wieder hören können.

Mögliche Ursache 2: Das Gerät ist ausgeschaltet.

Lösung: Schalten Sie das Gerät ein.

Fehlermeldungen bei der Wiedergabe von DAISY-Titeln.

Sprachausgabe: "Nicht unterstützte SD-Karte" oder "Nicht unterstütztes USB-Gerät".

Mögliche Ursache: SD-Karte oder USB-Medium ist mit nicht-unterstütztem Datei-System formatiert.

Lösung: Benutzen Sie eine mit FAT-16 oder FAT-32 formatierte SD-Karte.

Sprachausgabe: "Seite nicht gefunden."

Mögliche Ursache: Die angegebene Seitenzahl ist im aktuellen Titel nicht vorhanden.

Lösung 1: Geben Sie eine gültige Seitenzahl ein. Drücken Sie die Informationstaste, um Informationen zu den Seiten im aktuellen Titel abzurufen, und dann drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal und geben eine gültige Seitenzahl ein.

Lösung 2: Wählen Sie mit Taste 2 oder 8 den Eintrag "Seite" aus und bewegen sich dann mit Taste 4 oder 6 Seitenweise vor oder zurück.

Sprachausgabe: "Kein Titel ausgewählt. Bitte wählen Sie einen anderen Titel aus."

Mögliche Ursache: Im Quelllaufwerk befindet sich kein Medium.

Lösung: Legen Sie eine SD-Karte ein, schließen Sie ein USB-Medium an, oder legen eine CD, jeweils mit abspielbaren Dateien, ein. Dann können Sie mit der Vorheriger- oder der Nächster-Titel-Taste einen Titel auswählen.

Sprachausgabe: "Überschrift nicht gefunden."

Mögliche Ursache: Die angegebene Überschrift ist in diesem DAISY-Titel nicht vorhanden.

Lösung 1: Drücken Sie die Informationstaste, um Informationen zu den Überschriften abzurufen, und dann drücken Sie die Gehe-zu-Taste zweimal und geben eine gültige Überschriftennummer ein.

Lösung 2: Wählen Sie mit Taste 2 oder 8 eine Navigationsebene aus und bewegen sich dann mit Taste 4 oder 6 vor oder zurück.

Sprachausgabe: "Lesezeichen nicht gefunden".

Mögliche Ursache: Es gibt gar keine Lesezeichen, oder das angegebene Lesezeichen ist nicht vorhanden.

Lösung 1: Drücken Sie die Lesezeichentaste einmal und geben dann eine gültige Lesezeichenummer ein.

Lösung 2: Wählen Sie mit Taste 2 oder 8 den Eintrag "Lesezeichen" aus und bewegen sich dann mit Taste 4 oder 6 vor oder zurück.

Sprachausgabe: "Lesefehler."

Mögliche Ursache: Der Titel kann nicht abgespielt werden.

Lösung: Versuchen Sie, mit der Vorheriger- oder Nächster-Titel-Taste einen anderen Titel auszuwählen, oder wechseln Sie das Medium.

Fehlermeldungen bei der Wiedergabe von Musik-CDs oder Audio-Dateien.

Sprachausgabe: "Nummer xx nicht gefunden." (Beim Anspringen einer Albumnummer)

Mögliche Ursache: Es gibt nur ein Album oder die angegebene Albumnummer ist auf dem Medium nicht vorhanden.

Lösung 1: Drücken Sie die Gehe-zu-Taste zweimal und geben eine gültige Albumnummer ein.

Lösung 2: Wählen Sie mit Taste 2 oder 8 den Eintrag "Album" aus dem Navigationsmenü und suchen mit Taste 4 oder 6 das gewünschte Album.

Sprachausgabe: "Nummer xx nicht gefunden." (Beim Anspringen einer Tracknummer)

Mögliche Ursache: Die angegebene Tracknummer ist auf dem Medium nicht vorhanden.

Lösung 1: Drücken Sie die Gehe-zu-Taste einmal und geben eine gültige Tracknummer ein.

Lösung 2: Wählen Sie mit Taste 2 oder 8 den Eintrag "Track" aus dem Navigationsmenü und suchen mit Taste 4 oder 6 den gewünschten Track.

Fehlermeldungen bei der Medienverwaltung.

Sprachausgabe: "Kein Zielmedium gefunden".

Mögliche Ursache: Sie haben kein geeignetes Zielmedium angeschlossen.

Lösung: Schließen Sie eine SD-Karte oder ein USB-Medium mit ausreichend freiem Speicherplatz an und versuchen es dann noch einmal.

Sprachausgabe: "Die SD-Karte ist gesperrt"

Mögliche Ursache: Sie haben die SD-Karte mit Hilfe des Schiebers an der Seite der Karte gesperrt.

Lösung: Entnehmen Sie die Karte, entsperren sie am Schieber, führen sie erneut in den PLEXTALK ein und versuchen es noch einmal.

Anhang D - Glossar.

Abschnitt.

Ein Abschnitt ist bei einem Daisy-Titel der Audioanteil zwischen zwei Überschriften. Überschriften werden verwendet, um Kapitel, Abschnitte und Unterabschnitte eines Buches anzukündigen. Verwechseln Sie jedoch nicht den Abschnitt bei DAISY-Büchern mit dem eines herkömmlichen Buches. Für nähere Informationen zur DAISY-Struktur siehe Kapitel 3.

AMR-WB+.

Ein Standard zur Komprimierung von Audio-Dateien. Der PLEXTALK erkennt und spielt 3 verschiedene Audiostandards ab. Die Abkürzung steht für Adaptive Multi Rate - WideBand plus, ein Audiocodec mit der Endung AMR-WB. Unterstützt werden Stereosignale und höhere Samplingraten.

Bit rate/Datenübertragungsrate.

Eine Maßeinheit für die Datenübertragungsgeschwindigkeit. Sie bezieht sich auf die Anzahl Bits, die in einer Sekunde übertragen werden können.

CD-DA.

Ein CD-Format. CD-DA steht für CD-Digital Audio. Musik-CDs, die auf Audiogeräten abgespielt werden können, sind in diesem Format abgespeichert.

Copyrightinweis.

Informationen zu Erscheinungsjahr und Rechteinhaber eines Buches.

DAISY-Buch.

DAISY ist die Abkürzung für Digital Accessible Information System. Eine Aufnahme im DAISY-Format wird im Allgemeinen als DAISY-Buch oder DAISY-Titel bezeichnet. In ein DAISY-Buch kann eine hierarchisch aufgebaute Navigationsstruktur mit bis zu 6 Ebenen integriert werden. Weitere Informationen zum DAISY-Format finden Sie im Kapitel 3 dieses Handbuchs.

dB.

Abkürzung für "Dezibel". Dezibel ist die Maßeinheit für Lautstärke.

Ebene.

Der Ersteller eines DAISY-Buches kann bis zu 6 Navigationsebenen verwenden. Ebenen dienen zur Bestimmung von Elementen wie Kapiteln, Abschnitten und Unterabschnitten in einer Aufnahme. Wurde die Struktur festgelegt, kann der Nutzer Informationen überspringen, die er zu diesem Zeitpunkt nicht lesen möchte.

Gruppe.

Eine Gruppe ist ein Navigationselement für DAISY-Titel, durch welches Sie markante Stellen oder Einträge schnell auffinden können. Eine Gruppe kann beispielsweise dazu verwendet werden, Diagramme, Tabellen oder Bilder zu kennzeichnen.

HTML.

Abkürzung für "HyperText Markup Language". HTML ist die hauptsächlich verwendete Sprache für das Strukturieren von Webseiten. Es handelt sich hierbei um eine strukturierte Sprache, mit der Elemente wie etwa Absätze, Überschriften, Seiten, Links, Bilder und Tabellen in einer standardisierten Weise festgelegt werden können, so dass sie korrekt von Webbrowsern erkannt werden.

Höchste Seitenzahl.

Die Seitenzahl eines gewählten Titels mit der höchsten Nummer.

Medien.

Bezieht sich auf die Medien, von denen der PLEXTALK Daten liest. Der PLEXTALK unterstützt folgende Medien:

SD-Karten, USB-Medien und CDs. Sie können über die Titeltaste das Medium auswählen, auf welches der PLEXTALK zugreifen soll.

Mehrbändige CD.

Eine DAISY-CD, bei der ein Buch auf mehrere CDs aufgeteilt ist. Überschriften, Seiten, Lesezeichen, und so weiter können CD-übergreifend gezählt werden.

Menü.

Der PLEXTALK hat ein Menü, über welches Sie viele seiner Funktionen steuern können. Um ins Menü zu gelangen, drücken Sie die Menütaste. Im Menü finden sie Optionen wie „Wiedergabeeinstellungen“, „Überspringen“, „Medienverwaltung“ und „Systemeinstellungen“.

MP3.

Die Abkürzung für MPEG Audio Layer 3 (ISP oder IEC 13818-3:1995). Es handelt sich um einen Standard zur Audiokomprimierung, und es können gegenüber dem Original Kompressionsverhältnisse von einem Zehntel, oder sogar einem Zwölftel mit CD-Qualität erreicht werden.

Multi-Titel-CD.

Hörbücher, bei denen mehrere Titel auf einer CD gespeichert sind.

Phrase.

Eine Phrase bezeichnet beim DAISY-Format den Audioanteil zwischen zwei Pausen. Die Länge der Pause, die erkannt werden soll, bevor eine neue Phrase erstellt wird, wird als Pausenlänge der Phrase bezeichnet.

SD-Karte.

Eine Secure Digital (SD)- Karte ist ein Kartenformat für Flashspeicher, das von Matsushita, SanDisk und Toshiba für die Nutzung in tragbaren Geräten entwickelt wurde. Heute werden diese Karten häufig in Digitalkameras, Handhelds, PDAs, Handys, GPS-Empfängern und Spielekonsolen eingesetzt.

SDHC-Karte.

Steht für "Secure Digital High Capacity". Es handelt sich um ein Flash-Speicherkartenformat, das eine höhere Kapazität als 4 GB unterstützt.

Sonderseiten.

Seiten, die einem DAISY-Buch hinzugefügt werden können, und anderen Regeln folgen, als reguläre Buchseiten. Abbildungen und Tabellen, die sich in Mitten eines Buches befinden, können zum Beispiel als Sonderseiten aufgenommen werden. Sie können nicht mit der Gehe-zu-Taste zu Sonderseiten springen, gelangen jedoch dorthin, indem Sie die Option "Seite" im Navigationsmenü aufrufen.

Text to Speech (TTS).

Ein Verfahren, bei dem normaler Text in synthetische Sprache umgewandelt wird, um den Zugang zu Informationen zu ermöglichen, die andernfalls nicht zugänglich wären.

Titel (DAISY-Definition).

Auf der Titelseite werden alle Informationen zu einem Buch dargestellt, wie etwa der Name des Autors, Herausgebers oder Übersetzers, sowie Name und Standort des Verlages. Handelt es sich bei dem Buch um die Neuauflage eines bereits veröffentlichten Werkes, kann die Nummer der Auflage ebenfalls auf der Titelseite hinter dem Titel aufgeführt sein. Zusätzlich können Informationen wie das Veröffentlichungsjahr und ein Kolophon Bestandteile der Titelseite sein.

Titelseiten.

Seiten, die bei einigen Büchern am Anfang stehen. Die Nummerierung erfolgt meist in römischen Ziffern, oder Buchstaben des Alphabets, statt der üblichen Zahlennummerierung. Sie werden bei Aufnahmen mit dem PLEXTALK als Titelseiten bezeichnet. Zu dieser Art von Seiten können Sie nicht mit der Titel-Taste gelangen, jedoch können Sie solche Seiten über die Option "Seite" im Navigationsmenü anwählen, und dorthin mit der Taste 4 rückwärts, oder der Taste 6 vorwärts springen.

USB.

Abkürzung für Universal Serial Bus. Es handelt sich um eine Spezifikation für PC-Schnittstellen, an die Peripheriegeräte angeschlossen werden. Universell deshalb, weil sämtliche Peripheriegeräte, die früher unterschiedliche Anschlussarten am Computer nutzen mussten, wie Mäuse, Tastaturen, Drucker, Modems und Lautsprecher, jetzt über denselben Anschluss betrieben werden können.

Überschrift.

Die erste Phrase eines Abschnitts, oder die Stelle, an der ein neuer Abschnitt beginnt, wird als Überschrift bezeichnet.

Wave-Datei.

Ein digitales Format für Sounddateien in Microsoft Windows, dessen Dateierweiterung ".WAV" ist. Die meiste Software extrahiert CD- (Audio-CDs) Tracks und schreibt sie als Wave-Datei auf die Festplatte. Stellen Sie sicher, dass Sie immer über ausreichend Speicherplatz verfügen, wenn sie Musik von CDs auf Ihre Festplatte extrahieren. Ein Stück, das etwa 4 Minuten lang ist, nimmt ungefähr 40 bis 50 MB in Anspruch, wenn es als Wave-Datei abgespeichert wird. Da es sich um eine digitale Umwandlung handelt, ist das Ergebnis bei richtiger Ausführung eine perfekte Kopie des Stücks oder Audiotracks. Wave-Dateien können unterschiedliche Qualitätsstufen haben, je nachdem, wie sie erstellt oder abgespeichert werden. Die am häufigsten anzutreffende Qualitätsstufe liegt jedoch bei 44,1kHz, 16-Bit stereo. Dies entspricht Audiotracks auf Musik-CDs.

Index.

Abschnitt.....	13, 92
Abspielen.....	30, 38, 52, 59, 66
Akku.....	20-22, 35-36, 81
Album.....	61-64
AMR-WB+.....	38, 59, 81, 92
Audio-Datei.....	38, 46, 61-62, 74-75, 85
Aufladen.....	21-22
Automatische Abschaltung.....	36
DAISY.....	9-14, 89
Datum und Uhrzeit.....	30, 33-34
Ein-/Aus-Taste.....	19, 22-23, 28, 37, 88
Einschlaffunktion.....	19, 36, 37-38
Fehlerbehebung.....	88-91
Glossar.....	92-97
Gruppe.....	12, 57, 93
HTML.....	67-68, 93
Informationstaste.....	18, 30, 51-52
Klang.....	18, 42, 83
Kopieren.....	71-77
Lautstärke der Benutzerführung.....	29, 40-41, 86
Lesezeichen.....	13, 17, 31-32, 47-50
Menü.....	26-28, 94
Menühierarchie.....	85-87
MP3.....	59-60, 94
Musik-CD.....	9, 59, 72, 74
Neustartfunktion.....	37
PCM.....	60
Phrase.....	13, 58, 95
Play-/Stoptaste.....	18, 30, 39, 45-46
SD-Karte.....	15, 19, 23-24, 29, 39, 45, 95
SDHC-Karte.....	15, 19, 95
Spezifikation.....	81-84
Systemeigenschaften.....	78
Tastaturhilfe.....	23
Tastensperre.....	28

Text-To-Speech (TTS).....	32, 95
Titel löschen.....	71
Track.....	62-63
Überschrift.....	12, 31, 52-56, 69, 96
USB.....	19, 23,39 44, 96
Verschieben.....	71-78
Warteklang.....	35
Wave-Datei.....	60, 97
Wiedergabeeinstellungen.....	26, 65, 85, 88, 94
Wiedergabegeschwindigkeit.....	29, 41-42
Wiedergabelautstärke.....	29, 40
Zeitsprung.....	31

Darunter stehende Zahlen sind keine Seitenzahlen sondern Überschriftennummern.